



[Fiche technique]

Coussin hémostatique d'urgence 20x15 cm Coupe hémo

Réf. 304099

**Pour stopper rapidement et efficacement une hémorragie.
Permet d'éviter la surcompression et le risque de garrot artériel.
Testé et éprouvé par des sapeurs pompiers et des ambulanciers.**

- Coussin hémostatique d'urgence à usage unique évitant la surcompression et le risque de garrot artériel.
- Ultra pratique et prêt à l'emploi avec un coussin absorbant et une bande élastique cousue.
- Pour que la victime ne soit pas trop serrée, le coussin hémostatique est doté d'une partie non élastique située sur la bande.
- Pansement hémostatique absorbant 20 x 15 cm fixé avec le coussin sur la bande.
- Longueur de l'ensemble : 123 cm

Composition du coussin hémostatique :

- Conditionné dans un emballage individuel scellé.
- Paire de gants fournies.
- Etiquette de pose du pansement compressif.

Comment utiliser le coussin hémostatique ?

Pour toute plaie qui saigne, ce coussin hémostatique est conçu pour se substituer à la compression manuelle. Ce produit est le plus souvent utilisé par les secouristes pour secourir une victime d'hémorragie externe.

1. Déchirer l'emballage.

2. Appliquer le pansement absorbant en appuyant sur la plaie et commencer l'enroulement de la bande en laissant déborder de chaque côté.

3. Tendre la bande plus ou moins fort suivant l'importance de l'hémorragie externe. Il est logique que le coussin s'imbibent d'une certaine

quantité de sang jusqu'à ce que soit réalisé l'équilibre entre la pression extérieure et la pression intramusculaire.

Si l'hémorragie persiste, il sera nécessaire de régler la tension de la bande afin d'obtenir une pression suffisante.

4. Vérifier le pouls. Si le pouls n'est plus sensible en aval de la plaie, la pression est excessive. Il faut relâcher légèrement la tension de la bande.

Sécurité

Afin d'éviter d'éventuelles contaminations, se protéger avec les gants.

Indiquer l'heure sur l'étiquette de pose. Cette information sera fortement utile pour les secouristes et personnes du corps médical.

Compression faite, surveillez le pouls.

Enfin, après la pose du pansement hémostatique, veillez à prévenir rapidement les services d'urgence.

- Idéal pour mettre dans une [trousse premier secours](#).
- Découvrez notre gamme complète de [pansement hémostatique](#).

Informations complémentaires

A usage unique : risque de contamination par le sang en cas de réutilisation sur une peau lésée.

Emballage individuel sous film PEBD 100µ.

Une exposition à la lumière et la chaleur provoque un vieillissement de la mousse (elle peut devenir marron) ne garantissant plus sa capacité d'absorption.

Utiliser un autre coussin hémostatique si la mousse est jaunie.

Dispositif médical à considérer comme un déchet de soin.

Ne pas utiliser si le coussin hémostatique est défectueux, si l'emballage est abîmé ou après la date indiquée sous risque d'obtenir une moins bonne efficacité.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Longueur totale 123 cm. Coussin 10 cm
Utilisation	Usage unique
Stérile	Non Stérile
Matière	Mousse en polyéther Elastique en élastodiène non tissé avec velcro Paire de gants en vinyle
Unité de vente	Emballage individuel sous film PEBD 100µ.
Instructions d'utilisation	Ne pas utiliser si l'emballage est altéré avant utilisation. Une exposition à la lumière et la chaleur provoque un vieillissement de la mousse (elle peut devenir marron) ne garantissant plus sa capacité d'absorption. Utiliser un autre coussin hémostatique si la mousse est jaunie. Le coussin hémostatique est un dispositif médical qui doit être donc traité comme un déchet de soin. Si la date limite d'utilisation est dépassée, ne pas utiliser ce dispositif car les éléments peuvent être moins performants. Si le dispositif est défectueux, utiliser un autre coussin.
Classification	Dispositif médical de Classe 1

Références

Réf. 304099 Coussin hémostatique Coupe hémo - 10 cm

Photos



Coussin hémostatique Coupe hémo



Coussin hémostatique Coupe hémo




Coussin hémostatique Coupe hémo



Coussin hémostatique Coupe hémo



Coussin hémostatique Coupe hémo

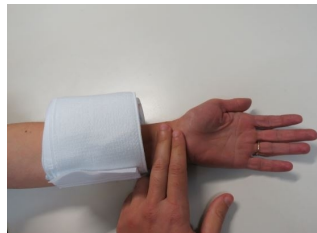

Coussin hémostatique Coupe hémo