



PHILIPS

[Fiche technique]

Electrode adulte HS1 Philips

Réf. 270701

Compatibles avec le défibrillateur HeartStart HS1

Convient aux victimes d'arrêt cardiaque pesant au moins 25 kg

Permet de mesurer le rythme cardiaque et de délivrer les chocs nécessaires.

- Electrodes HS1 Philips compatibles avec le défibrillateur Philips semi-automatique HS1 Heartstart de Philips.
- Indispensables pour l'utilisation du défibrillateur, elles permettent d'évaluer l'activité cardiaque de l'organisme.
- Electrode défibrillateur par paire de 2 pour DAE HS1 PHILIPS.
- Convient aux victimes d'arrêt cardiaque pesant au moins 25 kg.
- Durée de vie : 2 ans à partir de la date de fabrication.
- Découvrez notre large gamme d'électrodes défibrillateur.
- Retrouvez également tous les accessoires compatibles avec le défibrillateur HeartStart HS1 :
 - [Mallette de transport pour défibrillateur HS1](#)
 - [Batterie défibrillateur HS1](#)

Mise en place des électrodes défibrillateur Philips

1. Tirez sur la languette située en haut de la cartouche d'électrodes pour détacher la pellicule adhésive. À l'intérieur, deux électrodes adhésives sont placées sur une doublure en plastique.
2. Sortez les électrodes de la cartouche.

Mise en place électrodes défibrillateur Philips

3. Décollez une électrode de sa doublure.
4. Positionnez l'électrode adulte Philips sur la peau nue du patient, exactement comme indiqué sur le croquis de l'électrode.

Appuyez fermement sur l'électrode. Ensuite, faites la même chose avec l'autre électrode.

Vérifiez que la doublure en plastique a été retirée des électrodes avant de les mettre en place.



Informations complémentaires

Durée de vie avec emballage intact : 2 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Philips
Utilisation	Usage unique
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2b
Accessoires et Consommables	Réf. 270703 - Batterie Philips HS1 et FRx Réf. 270707 - Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1 Réf. 270709 - Électrodes adulte pour défibrillateur de formation HS1 Trainer Réf. 270710 - Électrodes nourrisson et enfant pour défibrillateur de formation HS1 Trainer


Photos




Electrodes HS1



Electrodes HS1

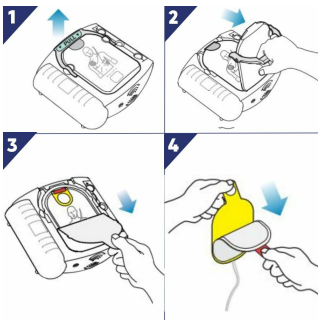

Electrodes HS1

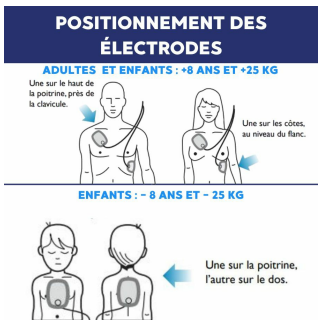

Electrodes HS1



Electrodes HS1



Electrodes HS1