



[Fiche technique]

Gilet secours Sober - Attelle Bras et Epaule

Réf. 240100

Attelle SOBER pour immobilisation du bras et de l'épaule en position de coude au corps. Idéale pour les traumatismes de l'épaule et du membre supérieur : luxations et fractures.

Attelle épaule ambidextre souple assurant une immobilisation optimale.

Fabriquée en tissu élastique : s'adapte à la morphologie de l'épaule gauche ou de l'épaule droite.

Fermeture facile par velcro.

Coussin d'abduction positionnable au niveau du creux de l'aisselle.

Indications

Traumatologie

- Luxations de l'épaule
- Fractures du trochiter, de la tête humérale, de la glène
- Entorses acromio-claviculaires
- Fracture de la clavicule

Post-opératoire

- Chirurgies de la coiffe des rotateurs
- Interventions sur l'articulation acromio-claviculaire
- Réparation ou ostéosynthèse de la clavicule

Rhumatologie

- Périarthrites scapulo-humérales aiguës

Neurologie

- Paralysies du plexus brachial
- Hémiplégies

Informations complémentaires

Un petit coussin d'abduction peut être incorporé dans le creux de l'aisselle.

Caractéristiques techniques

Marque	Sober
Dimensions	Pliée (LxIxh) 27,5 x 20 x 4 cm
Caractéristiques produit	Dimensions pliée (LxIxh) : 27,5 x 20 x 4 cm
Couleur	Orange
Conforme 10g	Non
Matière	Nylon, polyamide, polypropylène, élasthanne, polyester, coton Absence de latex Absence de phtalates Absence de nickel Absence de produit d'origine animale ou biologique
Unité de vente	A l'unité
Poids	255 g
Tailles disponibles	Taille unique
Instructions d'utilisation	Ne pas utiliser le dispositif en contact direct avec des pommades ou gels, protéger la zone sur laquelle sont appliqués ces produits avant la mise en place du dispositif. 1. Positionner le gilet sur l'épaule. 2. Réaliser la mise en place en respectant le code couleur : - Sangle bleu avec anneau bleu. - Sangle blanche avec anneau blanc. - Sangle rouge avec anneau rouge
Entretien	Lavage à 30° maximum, programme spécial pour le linge délicat
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9021101000
Référence fabricant (MPN)	GO/S
Quelle fonctionnalité recherchez vous?	Souple
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	A l'unité
Etanche	Non