



[Fiche technique]

Base pour immobilisateur de tête SpeedBlocks

Réf. 508512

Matériel permettant de remplacer la partie de la base de [l'immobilisateur de tête SpeedBlocks](#).

Cette base pour immobilisateur de tête est d'un grand confort pour l'utilisateur avec son coussinet de tête.

Constituée de 3 sangles pour une fixation optimale sur le plan dur : 2 latérales et 1 en son haut.

Caractéristiques techniques

Marque	Laerdal
Dimensions	(Lxlxh) 40,5 x 22 x env 3 cm
Couleur	Bleu
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Garantie	1
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1.
Entretien	<p>Nettoyage et préparation à la réutilisation</p> <ol style="list-style-type: none">1. Séparer les pièces Détacher les blocs de la base et retirer la base du brancard rigide. Jeter tout coussinet de bloc, courroie pour la tête ou coussinet de la base qui a été contaminé par des liquides corporels. On peut réutiliser la base et les blocs après les avoir nettoyés soigneusement..2. Frotter et faire tremper Frotter les pièces dans une solution 16:1 d'eau à 38 °C et de détergent à vaisselle pendant 4 minutes. Rincer les pièces à l'eau propre à une température de 38 °C. Faire tremper les pièces dans une solution 100:1 (concentration de 0,5 %) d'eau à 38 °C et d'agent de blanchiment domestique pendant 10 minutes..3. Rincer et laisser sécher Rincer les pièces à l'eau propre à une température de 38 °C et les laisser sécher complètement à l'air à température ambiante (environ 21 °C)..4. Poser les coussinets Poser les courroies et les coussinets de rechange, au besoin.5. Remettre la base en place Remettre la base en place sur le brancard rigide et ranger les blocs.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	90219090
Référence fabricant (MPN)	983060
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 508511 - Sangles et coussinets pour immobilisateur de tête Speedblocks® Réf. 508513 - Blocs latéraux pour immobilisateur de tête Speedblocks