



[Fiche technique]

Batterie Intellisense pour défibrillateur G5 Cardiac Science

Réf. 250905

Batterie pour défibrillateur Powerheart G5 Cardiac Science

Peut administrer jusqu'à 500 chocs à 150 VE et 450 chocs à 200 VE


Batterie au lithium Intellisense®.

- Batterie intellisense G5 pour [défibrillateur automatique PowerHeart G5](#) et semi-automatique Cardiac Science Powerheart G5.
- Batterie lithium G5 avec tension de sortie : 12 V CC (nominale), 16 heures de fonctionnement.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, le défibrillateur peut encore administrer 9 chocs minimum.
- La batterie powerheart stocke automatiquement l'historique de sa durée de service. L'historique de la batterie peut être consulté avec le logiciel AED Manager.
- Durée de vie de la batterie Powerheart G5 : 4 ans.
- Découvrez notre large gamme de [batteries pour défibrillateur](#).
- Retrouvez également chez SMSP :
 - Les [électrodes défibrillateur adultes Powerheart G5](#)
 - Les [électrodes défibrillateur enfants Powerheart G5](#)
 - Les [électrodes défibrillateur adultes Powerheart G5 avec capteur RCP](#)

Comment remplacer la batterie Powerheart G5 ?

1. Appuyez sur l'ergot
2. Soulevez
3. Insérez la batterie intellisense G5 neuve
4. Appuyez jusqu'au déclic
5. Assurez-vous que le voyant d'état Rescue Ready est vert

Assurez-vous que la batterie Powerheart G5 est à température ambiante avant de l'insérer dans le DAE.

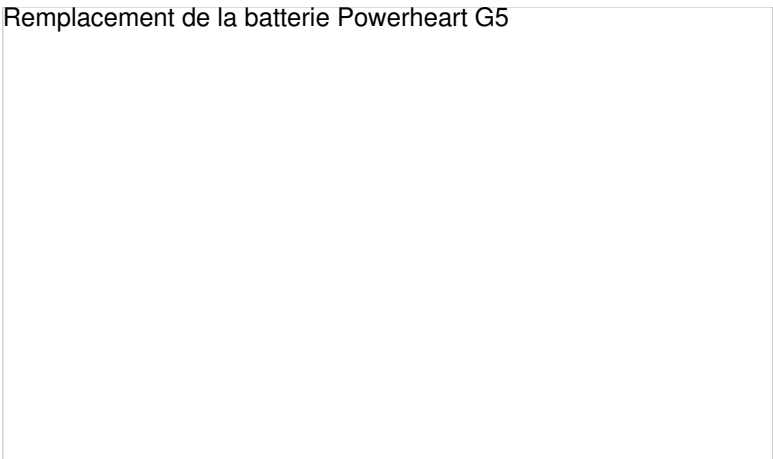

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Couleur	Orange
Gamme	Powerheart G5
Conforme 10g	Non
Matière	Lithium
Unité de vente	A l'unité
Garantie	4 ans, remplacement opérationnel complet / durée de vie de 5 ans à compter de la date de fabrication
Indice de protection	IP 55
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9018199000
Référence fabricant (MPN)	XBTAED001A
Code ONU	3090

Photos




Batterie Intellisense pour
défibrillateur G5 Cardiac Science



Batterie Intellisense pour
défibrillateur G5 Cardiac Science



Batterie Intellisense pour
défibrillateur G5 Cardiac Science

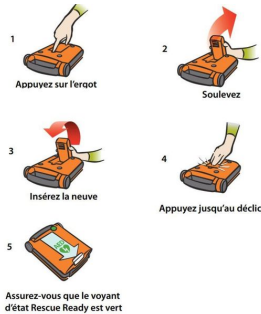

Batterie Intellisense pour
défibrillateur G5 Cardiac Science

Batterie Intellisense®

La batterie Intellisense (modèle XBTAED001A) inclut automatiquement l'historique de sa durée de service. L'historique de la batterie peut être consulté avec le logiciel *AED Manager*. Important : Pour les consignes de sécurité importantes, voir *Avertissements et mises en garde*, à la page 3-4.

Remplacement de la batterie :

- 1 Appuyez sur l'ergot
- 2 Soulevez
- 3 Insérez la neuve
- 4 Appuyez jusqu'au clic
- 5 Assurez-vous que le voyant d'état Rescue Ready est vert

Remarque : Assurez-vous que la batterie est à température ambiante avant de l'insérer dans le DAE.

Batterie Intellisense pour
défibrillateur G5 Cardiac Science