



[Fiche technique]

Ceinture pelvienne pompier Sam Sling II

Réf. 303100 - 303200 - 303300 - 303101

En cas de traumatisme ou de fracture du bassin.

Avec boucle autostop évitant un serrage excessif ou insuffisant.

Utilisée par les secouristes du monde entier.

- Ceinture pelvienne d'urgence Sam Sling utilisée par les secouristes du monde entier en cas de traumatisme ou de fracture du bassin.
- Très efficace pour stabiliser le bassin en toute sécurité en cas de fracture de l'anneau pelvien.
- Permet également de réduire les risques d'hémorragie interne dus à un traumatisme du bassin.
- Monobloc (sans pièces détachables), la Sam Sling est ultra simple d'utilisation et rapide à installer en seulement 3 gestes.
- Ceinture pelvienne secourisme dotée d'une boucle "auto-stop" permettant de bloquer la traction nécessaire autour du bassin du patient (ceci en fonction de sa morphologie) tout en maintenant une compression stable et adaptée.
- Compatible rayon X et RMN.
- A usage unique.
- Retrouvez notre gamme complète d'[attelles](#).
- Découvrez également notre gamme complète de [plans durs](#).

Boucle brevetée AutoStop



Boucle Autostop

En fonction de la morphologie de la personne et une fois la bonne traction atteinte, la ceinture va se bloquer

Où positionner la ceinture Sam Sling?



Sam Sling II, placée au niveau des grands trochanters

Vous recherchez une [attelle cheville pied](#) ? Consultez notre sélection sur smsp.fr.

Pose de la ceinture pelvienne SAM Sling – en 3 étapes

Étape 1 – Préparation du patient

- Retirer les objets présents dans les poches du patient ou dans la région pelvienne.
- Positionner la ceinture SAM Pelvic Sling II sous le patient, en la centrant au niveau des trochanters (hanches).
- La face noire de la ceinture doit être orientée vers le haut.

Étape 2 – Installation de la sangle

- Insérer la SANGLE NOIRE dans la boucle.
- Tirer fermement la sangle jusqu'à la butée.

Étape 3 – Serrage automatique

- Tirer sur la SANGLE ORANGE (ou VERTE sur le modèle PS301-OD-EN) dans le sens opposé à la SANGLE NOIRE.
- Poursuivre jusqu'à entendre et sentir un déclic provenant de la boucle.
- Maintenir la tension, puis plaquer immédiatement la SANGLE NOIRE contre la ceinture pour la fixer.

• Fracture de l'anneau pelvien – Fiche secouriste

Définition

La fracture de l'anneau pelvien correspond à une rupture partielle ou complète des os du bassin (ilium, pubis, ischion, sacrum), souvent liée à un traumatisme violent (accident de la route, chute de hauteur, écrasement).

Signes évocateurs

- Douleur intense au niveau du bassin, augmentée à la palpation ou au mouvement.
- Impossibilité ou douleur à mobiliser les membres inférieurs.
- Raccourcissement et rotation externe d'un membre inférieur.
- Instabilité du bassin (palpation en « compression/décompression » à éviter en préhospitalier).
- Signes de choc hémorragique (pouls rapide, pâleur, sueurs, hypotension).

• Risques majeurs

- Hémorragie interne massive (le bassin peut contenir jusqu'à 4 L de sang).
- Lésions associées : vessie, uretères, organes génitaux, nerfs, vaisseaux iliaques.

• Conduite à tenir (secours préhospitaliers)

1. Immobilisation du bassin en urgence :
 - Pose d'une ceinture pelvienne (type SAM Sling) au niveau des trochanters.

- En l'absence de ceinture : contention improvisée avec drap ou bandage large.
- 2. Ne pas mobiliser inutilement le patient (éviter d'aggraver le saignement).
- 3. Mise sous O₂ et surveillance des constantes.
- 4. Transmission rapide au SAMU / équipe médicale avec bilan lésionnel complet.
- 5. Évacuation en position allongée, sans flexion excessive des hanches.

Informations complémentaires

Produit radio-transparent et adapté pour les IRM.

Nettoyage avec un détergeant standard ou une solution antimicrobienne. Ne pas stériliser à la vapeur (autoclave).

Arrière offrant peu d'adhérence, ce qui permet de faciliter les transferts.

Vérifier qu'il n'y a aucun objet dans les poches ou au niveau du bassin de la victime.

Ne pas utiliser la ceinture sur un enfant.

Ne pas placer la ceinture sur une victime non extraite d'un véhicule.

Caractéristiques techniques

Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Nylon, polypropylène, polyester, vinyle, uréthane, copolymère acétal, acier inoxydable. Sans latex.
Instructions d'utilisation	Ne pas utiliser la ceinture sur un enfant. Ne pas placer la ceinture sur une victime non extraite d'un véhicule.
Entretien	Nettoyage avec un détergeant standard ou une solution antimicrobienne. Ne pas stériliser à la vapeur (autoclave).
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Quelle fonctionnalité recherchez-vous?	Souple
Quel âge a la victime que vous souhaitez transférer?	Adulte
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	A l'unité
Étanche	Non

Références

Réf. 303300	Ceinture pelvienne Sam Sling - Taille XS Dimensions : 69-114 cm Couleur : bleu / orange
Réf. 303100	Ceinture pelvienne Sam Sling - Taille Standard Dimensions : 81-127cm Couleur : bleu / orange
Réf. 303101	Ceinture pelvienne Sam Sling version militaire - Taille standard Dimensions : 81-127cm Couleur : noir / vert militaire
Réf. 303200	Ceinture pelvienne Sam Sling - Taille XL Dimensions : 91-137 cm Couleur : bleu / orange

Photos



ceinture pelvienne réutilisable
disponibles en 3 tailles sur 4
modèles



ceinture pelvienne taille 69-114cm




ceinture pelvienne taille 81-127cm



ceinture pelvienne taille 91-137 cm



ceinture pelvienne modèle militaire
taille 81-127cm

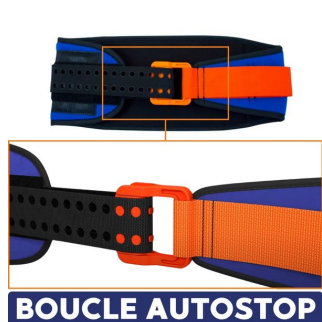

ceinture pelvienne pompier