



[Fiche technique]

## Coalgan mèche hémostatique 4cm - Boîte de 5

Réf. 307307

### Mèches Hémostatiques Coalgan – Épistaxis et Hémorragies Externes

Coalgan – Mèches hémostatiques à base d'alginate de calcium

#### Description

Coalgan est un dispositif médical stérile à usage unique, conçu pour favoriser l'hémostase locale. Idéal en cas d'épistaxis (saignement de nez), il convient à tous les publics : adultes, enfants et femmes enceintes.

Fabriqué à partir de fibres d'alginate de calcium d'origine végétale, Coalgan se présente sous forme de mèches prêtes à l'emploi. Ne pas couper la mèche : elle doit être utilisée dans son intégralité.

#### Indications

- Saignements nasaux (épistaxis)
- Convient à l'enfant, à la femme enceinte et à l'adulte
- Usage en premiers secours ou en cabinet médical

#### Temps d'application recommandé de Coalgan

- En cas d'épistaxis (saignement de nez) et d'hémorragie externe modérée:
  - Durée minimale d'application : Coalgan doit rester en place au moins 30 minutes pour permettre la formation du gel hémostatique et favoriser la coagulation.
  - Durée maximale d'application : Ne pas dépasser 24 heures. Au-delà de ce délai, il est nécessaire de retirer le produit pour éviter toute macération ou infection.
- Retrait anticipé :

Si le saignement est contrôlé et qu'un pansement secondaire est appliqué, Coalgan peut être retiré plus tôt. Pour faciliter le retrait, il est recommandé de l'humidifier avec du sérum physiologique afin d'éviter qu'il n'adhère à la plaie.

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 1 mèche = 4 cm de longueur
- Couleur : Vert d'eau, Blanc
- Matière : Fibre d'alginate de calcium (origine végétale)
- Stérilité : Produit stérile à usage unique
- Température de stockage : Inférieure à 30°C
- Conditionnement : Boîte de 5 mèches hémostatiques stériles, en sachet individuel
- Classification : Dispositif médical de classe IIb
- Code SH : 3005903100
- Référence fabricant : 2110001126

---

#### Instructions d'utilisation

1. Torsader la mèche Coalgan pour former un cylindre compact.
2. Introduire délicatement dans la narine.
3. Pincer les deux narines et maintenir la pression pendant 10 minutes.
4. Laisser en place la mèche au moins 30 minutes, sans dépasser 24 heures.

---

#### Précautions d'emploi

- Usage externe uniquement
- Ne pas couper la mèche
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- Ne pas réutiliser

#### À noter sur l'usage du coalgan en cas d'hémorragie externe:

- Il ne remplace pas un traitement d'hémorragie sévère (comme un pansement hémostatique de type [ChitoGauze](#), Celox ou un garrot).
- Il doit être utilisé uniquement sur des plaies peu profondes, sans corps étranger ni saignement pulsatile.
- Il n'est pas indiqué en cas d'hémorragie artérielle grave ou de plaie très profonde.

## Informations complémentaires

S'utilise chez l'enfant, la femme enceinte et l'adulte.

Ne pas couper, s'utilise dans son intégralité.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Longueur d'une mèche 4 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Ne pas couper, s'utilise dans son intégralité. Température de stockage < 30°C.
<b>Couleur</b>	Vert D Eau, Blanc
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Fibre d'alginate de calcium (origine végétale).
<b>Unité de vente</b>	Boite de 5 mèches hémostatiques stériles en sachet individuel
<b>Garantie</b>	1
<b>Instructions d'utilisation</b>	Torsader Coalgan pour obtenir une mèche compacte et introduire dans la narine. Pincer les 2 narines pendant 10 minutes. Laisser Coalgan au moins 30 minutes et au maximum 24 heures.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 2b
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3005903100
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	2110001126
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



Coalgan mèche hémostatique  
d'origine naturel pour saignement