



[Fiche technique]

Débimètre de pointe Peak Flow - PINNACLE

Réf. 1608

Dispositif idéal pour les asthmatiques ayant le besoin impératif de mesures fiables. Dispose d'une échelle de mesure facile à lire pour une parfaite gestion de l'asthme.

- Débimètre de pointe parfaitement conforme au standard des peak-flow, la norme ISO 23747, il apporte performance et qualité.
- Dispose d'une échelle de mesure facile à lire et sur-mesure grâce à ses zones de couleur, étudiées pour une bonne gestion de l'asthme.
- La conception avancée de ce peak-flow lui évite tout démontage, protégeant ainsi l'intégrité du mécanisme.
- Équipé d'un clapet anti-retour interne pour éviter les problèmes d'infection croisée.
- Grande précision et reproductibilité infaillible.

Informations complémentaires

Zones de couleur mobiles pour la gestion de l'asthme (personnalisable aux valeurs théoriques du patient)

Grande échelle de mesure, très facilement lisible

Échelle de débit de 60 à 900l / mn pour adulte et enfant

Type d'exploration par expiration seulement

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxl) 15 x 4 cm
Caractéristiques produit	Zones de couleur mobiles pour la gestion de l'asthme (personnalisable aux valeurs théoriques du patient) Grande échelle de mesure, très facilement lisible Échelle de débit de 60 à 900l / mn pour adulte et enfant Type d'exploration par expiration seulement
Couleur	Blanc
Utilisation	Réutilisable
Sterile	Non Sterile
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	60 g
Garantie	2 ans
Normes et Certification	ISO 23747 EN 13826
Instructions d'utilisation	Insérez l'embout (M) dans l'appareil, et placez le pointeur (P) vers l'extrémité de la fente indiquant zéro. Tenez l'instrument en vous assurant de ne pas obstruer la fente ou les trous de l'extrémité. En vous tenant bien droit, inspirez pleinement et placez l'embout dans votre bouche, en vous assurant que vos lèvres sont bien fermées et que l'air ne s'échappe pas. Soufflez ensuite aussi vite et fort que possible sans que votre langue ne vienne dans l'embout.
Entretien	Votre instrument doit être nettoyé régulièrement. Pour cela, immergez-le dans une solution tiède légèrement détergente pendant 2 à 3 minutes et agitez. Rincez dans de l'eau propre tiède, puis secouez pour retirer l'excès d'eau avant de laisser sécher à l'air libre. NE JAMAIS METTRE L'INSTRUMENT AU CONTACT D'EAU BOUILLANTE
Classification	Dispositif médical de classe 1m
Partie du corps	
Code SH	9018199000
Accessoires et Consommables	Réf. 291306 - Embouts carton pour spiromètre - Lot de 100

Photos

