

[Fiche technique]

Electrode défibrillateur Smart Pads II FRx Philips

Réf. 270704

Compatibles avec le défibrillateur semi automatique FRx de la marque Philips.

Electrodes pré-connectables adhésives et jetables.


Utilisable sur les adultes et les enfants.

- Electrode défibrillateur FRx SMART PADS II uniquement compatible avec le défibrillateur semi automatique FRx de la marque Philips.
- Electrode smart pads II Philips pré-connectables adhésives et jetables.
- Dans les situations d'urgence, les électrodes heartstart smart pads II permettent de gagner un temps précieux grâce à leur double utilisation à la fois sur les adultes et les enfants.
Vous n'avez donc plus besoin d'investir dans plusieurs modèles d'électrodes en fonction du type de patient à traiter.
- Concernant la défibrillation des enfants de moins de 8 ans ou d'un poids inférieur à 25 Kg, l'insertion de [la clé de défibrillation pédiatrique](#) est obligatoire (Ref.270722 non fournie).
- La paire d'électrode smart pads II est protégée dans un étui en plastique pratique : se glisse facilement dans une armoire DAE ou dans une mallette de transport.
- Découvrez notre large gamme d'[électrodes pour défibrillateurs](#).

Mise en place des électrodes défibrillateur smart pads 2

1. Retirez l'étui des électrodes SMART PADS II de la sacoche de transport.
2. Si besoin, séchez et nettoyez la peau du patient, coupez ou rasez les poils du thorax pour assurer un bon contact des électrodes avec la peau nue.
3. Ouvrez l'étui des électrodes.
4. Décollez une électrode défibrillateur Philips.
5. Placez l'électrode sur la peau nue du patient conformément au schéma. Appuyez fermement sur la partie adhésive de l'électrode. Ensuite, faites la même chose avec l'autre électrode.

Le placement des électrodes est très important. Les électrodes sur le schéma de placement du FRx se mettent à clignoter sur le panneau avant pour vous guider.

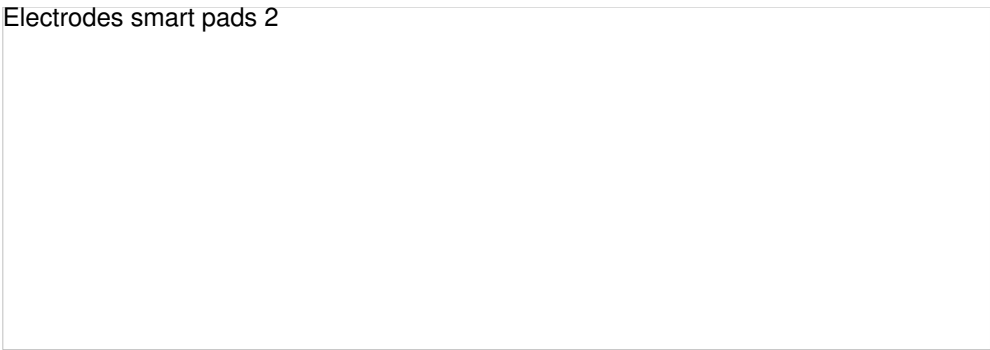

Informations complémentaires

Durée de vie avec emballage intact: 2 ans.
Insérer la clé pédiatrique en option pour utiliser les électrodes sur un enfant.

Caractéristiques techniques

Marque	Philips
Dimensions	Surface active nominale de chaque électrode: 80cm2 - Longueur du câble: 121,9 cm
Caractéristiques produit	Durée de vie avec emballage intact: 2 ans. Insérer la clé pédiatrique en option pour utiliser les électrodes sur un enfant.
Couleur	Gris, Bleu
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Etui avec une paire de 2 électrodes
Livré avec	Un étui en plastique
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2b
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	90189000
Accessoires et Consommables	Réf. 270722 - Clé pédiatrique pour défibrillateur Philips FRX