



[Fiche technique]

Kit membre sectionné secours et pompier

Réf. 304119

Kit complet et facile à utiliser conçu pour récupérer un membre sectionné en respectant les conditions d'hygiène nécessaires. Recommandé par les secouristes sur notre boutique SMSP.

Kit Membre Sectionné Secourbox : une Solution Complète et Pratique Assemblée en France

Le kit membre sectionné Secourbox est une trousse de secours complète, spécialement conçue pour récupérer et conserver un membre sectionné (doigt, main, orteil...) tout en respectant les conditions d'hygiène strictes. Idéal pour les entreprises et collectivités, ce kit maximise les chances de réussite d'une greffe grâce à ses équipements adaptés et simples d'utilisation.

Pourquoi choisir le kit Secourbox ?

- Hygiène optimale : Le kit protège le membre sectionné des microbes pour garantir les meilleures conditions de conservation.
- Facilité d'utilisation : Livré avec un guide détaillé pour une prise en charge rapide et efficace de la situation.
- Équipement complet : Tous les outils nécessaires pour stopper les saignements et conserver le membre à la bonne température sont inclus.
- Qualité professionnelle : Recommandé par les secouristes et assemblé en France.

Composition du kit membre sectionné

- 1 sac de transport isothermique (dimensions : 30 x 30 cm) avec 2 compartiments latéraux pour les poches de froid et 1 compartiment central pour le membre.
- 4 poches de froid instantanées à usage unique pour maintenir une température adaptée.
- 1 pansement absorbant américain (10 x 20 cm) pour gérer les petits saignements.
- 1 [pansement compressif](#) stérile (12 cm x 1 m) pour stopper l'hémorragie.
- 4 blisters de 2 compresses stériles (7,5 x 7,5 cm).
- 2 champs stériles (75 x 75 cm) pour préparer une zone de soin propre.
- 2 paires de gants stériles sans latex (taille L) et 2 paires de gants stériles en latex (taille L).
- 1 guide de premiers secours pour accompagner chaque étape de l'intervention.

Caractéristiques techniques du kit membre sectionné

- Dimensions de la mallette : 34 x 26 x 8,5 cm
- Utilisation recommandée : Entreprises, collectivités, ou tout lieu de travail où des accidents graves peuvent survenir.

Avec le kit Secourbox, vous êtes prêt à gérer les situations d'urgence en toute sécurité et avec une efficacité optimale. Un outil indispensable pour protéger la santé et maximiser les chances de réussite des interventions chirurgicales.

Comment récupérer et conserver un membre sectionné ?

Etape 1 : Arrêter l'hémorragie

- Allonger la victime en surélevant son membre sectionné.
- Enfiler la paire de gants.
- Appuyer fortement sur le moignon du membre sectionné avec un pansement compressif.

Etape 2 : Appeler les urgences

- Contacter les urgences : SAMU (15), Pompiers (18), numéro d'urgence européen (112).
- Expliquer au secouriste la nature de l'accident.
- Ne pas donner à manger ou à boire à la victime afin de ne pas ralentir l'anesthésie en cas d'opération chirurgicale.

Etape 3 : Mettre le membre sectionné dans le sac de transport isothermique

- Mettre les poches de froid à percuter dans le compartiment prévu du sac de transport isothermique.
- Placer le membre amputé dans le compartiment central du sac isothermique.
- Ne jamais mettre le membre sectionné directement en contact avec la glace au risque de provoquer des lésions et brûlures.
- L'objectif est de freiner la dégradation des tissus du membre amputé et ainsi augmenter les chances de succès de la greffe.

Etape 4 : Rester auprès de la victime

- Couvrir la victime à l'aide de la couverture de survie et lui parler jusqu'à l'arrivée des secours.
- Ne retirer pas le pansement, même si l'hémorragie est arrêtée jusqu'à l'arrivée des secours.

Découvrez notre gamme complète de [trousse de secours entreprise](#).

Caractéristiques techniques

Marque	Secourbox
Dimensions	(LxIxh) 34 x 26 x 8,5 cm
Composition de l'ensemble	- 1 sac de transport isothermique 30 x 30 cm composé de 2 compartiments latéraux pour les poches de froid et d'1 compartiment central pour le segment sectionné ou écrasé - 4 poches de froid à percuter, à usage unique - 1 pansement absorbant américain 10 x 20 cm pour stopper les petits saignements - 1 pansement compressif stérile 12 cm x 1 m - 4 blisters de 2 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm - 2 champs stériles 75 x 75 cm - 2 paires de gants stérile sans latex taille L - 2 paires de gants stériles latex taille L - 1 guide 1er secours
Couleur	Vert
Stérile	Non stérile
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Garantie	1
Classification	Assemblage de dispositifs médicaux
Partie du corps	
Code SH	3006500000
Nombre de pièces	21
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 304118 - Couverture de survie non stérile - 140 x 210 cm Réf. 304109 - Couverture de survie argent/or non stérile - 160 x 210 cm Réf. 304004 - Couverture de survie stérile 160x210cm Réf. 304305 - Couverture de survie pédiatrique non stérile 110 x 140 cm Réf. 304219 - Support mural pour kit membre sectionné Réf. 304154 - Sac isotherme double compartiment 30 x 30 cm Réf. 304151 - Sac isotherme double compartiment 45 x 45 cm Réf. 251110 - Kit membre sectionné à remplir

Photos



KIT 18 PIÈCES

Kit membre sectionné secours et pompier 18 pièces assemblé en France



DIMENSIONS

Dimensions du kit membre sectionné secours et pompier : 34 x 26 x 8,5 cm



Composition du kit membre sectionné secours et pompier