



[Fiche technique]

Lunettes oxygène

Réf. 278098 - 278099 - 278100

3 TAILLES

Apporte une aide respiratoire aux personnes ayant besoin d'un apport en oxygène d'urgence. Lunette à oxygène permettant une inhalation optimale d'O₂ concentré par le nez.

- Lunette O₂ avec tuyau anti-écrasement : assure un passage correct et continu de l'oxygène.
- Lunette oxygène en PVC transparent souple et fin pour garantir un apport d'oxygène en continu.
- Seul l'embout d'insertion du canal nasal varie en fonction de la taille du patient (nourrisson, enfant ou adulte).
- Lunette à oxygène indispensable pour délivrer une FiO₂ élevé.
- Débit de 1 à 4 L/mn.
- Matériel d'oxygénothérapie disponible en 3 tailles : bébé, enfant et adulte.
- Embout nasal droit en PVC.
- Se raccorde à la bouteille d'oxygène.
- Vendu à l'unité.

Quand faut-il utiliser des lunettes à oxygène ?

[Matériel d'oxygénothérapie](#) utilisé de manière générale pour les situations d'urgence. Les lunettes o₂ permettent d'apporter une assistance respiratoire avec un débit de FiO₂ élevé allant de 0,5 à 5l/min d'o₂, soit environ entre 25 et 40% de l'apport en oxygène nécessaire. Il est important de noter que les lunettes à oxygène o₂ ne conviennent pas dans les situations de détresse respiratoire aigue. Ce genre d'urgence nécessite une assistance respiratoire bien plus importante grâce [à l'aide d'un masque haute concentration](#).

Comment faut-il utiliser des lunettes o₂ ?

1. Placer les deux petits embouts dans les narines
2. Passer ensuite la tubulure derrière les deux oreilles : les tuyaux doivent faire le tour complet des oreilles pour se rejoindre en avant sous le menton
3. Régler les lunettes o₂ sous le menton en vous aidant de la bague coulissante
4. Connecter les lunettes oxugène directement à l'humidificateur ou par l'intermédiaire du tuyau souple
5. Ajuster le débit d'oxygène

Précautions à prendre :

- Une personne placé sous assistance respiratoire doit faire l'objet d'une surveillance médicale en continue
- L'oxygène respiré doit obligatoirement être humidifié
- Surveiller l'émergence de muqueuses chez le patient

- Surveiller l'émergence de lésions cutanées au niveau du nez et du passage des tuyaux derrière les oreilles.

Informations complémentaires

Débit de 1 à 4 L/mn.
Embout nasal droit en PVC.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Modèle adulte Ø 4 mm x 200 cm / Modèle enfant et nourrisson Ø 6 mm x 200 cm
Couleur	Vert, Transparent
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Sous sachet individuels soudé
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 278098	Lunette oxygène - Bébé
Réf. 278099	Lunette oxygène - Enfant
Réf. 278100	Lunette oxygène - Adulte

Photos



3 TAILLES

Lunettes oxygène débit 1 à 4L
minute pour oxygénothérapie



DIMENSIONS

dimension Lunettes oxygène débit 1
à 4L minute adulte



DIMENSIONS

Lunettes oxygène débit 1 à 4L
minute enfant



DIMENSIONS

Lunettes oxygène débit 1 à 4L
minute nourisson

