



[Fiche technique]

Maintien tete pompier immobilisateur en 2 parties

Réf. 509674



Embase en 2 parties + 2 blocs latéraux

1 sangle frontale et 1 sangle menton

Universel compatible avec tout type de brancard cuillère

Les avantages en 3 mots de cet [immobilisateur de tête](#) pour civiere de relevage:

- Universalité
- Simplicité
- Nettoyable

Universalité

De par sa conception. L'embase et les blocs tête viennent se sangler sur une civiere de relevage. Vous pouvez regarder la vidéo si vous avez besoin d'aide dans le déploiement.

Simplicité d'assemblage

Embase en 2 parties : 19,5 x 24,5 x 1 cm (x2)

2 blocs latéraux : parallélépipède : 24 x 14 x hauteur haut 5 x hauteur bas 8,5 cm (x2)

1 sangle frontale et 1 sangle menton

4 sangles à boucles et 2 sangles velcro sur chaque partie d'embase

Grands trous d'oreille pour surveiller le conduit auditif du patient.

Nettoyage recommandé avec une lingette imprégnée de produit désinfectant médical ou une solution d'alcool à 75°.

Le brancard "cuillère" en SUAP, une nouveauté ? Le brancard cuillère devient le matériel plébiscité dans les dernières recommandations premiers-secours de septembre 2019, une nouveauté ? Lire l'article de Rescue 18:

<https://rescue18.fr/formation/le-brancard-cuillere-en-suap-une-nouveaute/>

Vous avez besoin d'une [attelle radiotransparente](#) ? Retrouvez-le dès maintenant sur smsp.fr.

Informations complémentaires

Température ambiante de stockage à l'abri de l'humidité et loin d'une source de chaleur.

Caractéristiques techniques

Marque	Sober
Dimensions	(L x l x h) 39 x 24,5 x 14 cm
Caractéristiques produit	Embase en 2 parties : 19,5 x 24,5 x 1 cm (x2) 2 blocs latéraux : parallépipède : 24 x 14 x hauteur haut 5 x hauteur bas 8,5 cm (x2)
Couleur	Rouge
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Matière	Mousse EVA Revêtement vinyle coloré
Poids	830 g
Instructions d'utilisation	1-Fixer chaque côté de l'immobilisateur sur la civière de relevage en veillant à ce que l'ensemble soit bien immobile. 2-Tout en maintenant la tête à deux mains préalablement immobilisée par un collier cervical, positionner la tête de la victime au centre. 3-Placer les coussins au contact de la peau du visage sans exercer de pression. 4-Placer les deux lanières : une passant sur le front et une seconde sur le menton, en exerçant une pression suffisante pour que l'ensemble immobilise la tête. Dans ce cas, le maintien de la tête par un opérateur peut être arrêté. 5-Comme après chaque relevage, effectuer une surveillance avec une attention particulière à l'évolution de la douleur. <i>Conduite à tenir issue du référentiel de Premiers Secours en Equipe de niveau 2 en vigueur en Janvier 2014.</i>
Entretien	Nettoyage recommandé avec une lingette imprégnée de produit désinfectant médical ou une solution d'alcool à 75°
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9021109000
Référence fabricant (MPN)	ITP2P/TU
Etanche	Non


Photos



2 PARTIES



immobilisateur de tête 2 partie pour
ambulancier

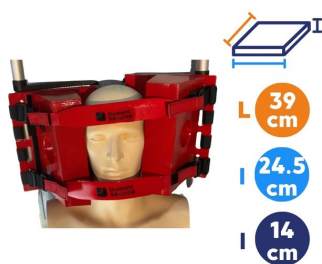


DIMENSIONS

dimension immobilisateur de tête



COMPOSITION

composition de l'immobilisateur de
tête

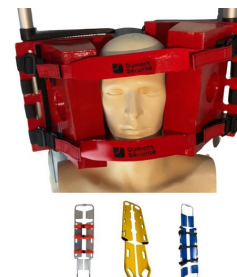

UNIVERSEL

Bloc de maintien tête compatible
universelle