


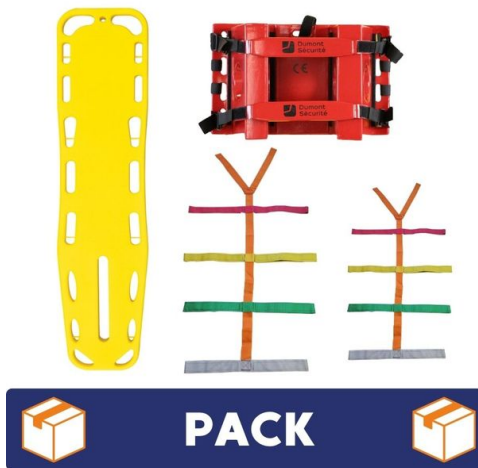

[Fiche technique]

Pack Immobilisation pro Plan dur Immobilisateur de tête

Réf. 555559

Pack Immobilisation pro Plan dur Immobilisateur de tête 2 Sangles araignée

Composition du pack immobilisation pro ambulancier et secouristes

- ref 555555 : 1 [plan dur](#) jaune
- ref 509671 : 1 [immobilisateur de tête](#)
- ref 509027 : 1 [Sangle araignée adulte](#)
- ref 509026 : 1 [Sangle araignée enfant](#)

Le plan dur, également appelé planche dorsale, est un dispositif utilisé en secourisme pour immobiliser l'axe tête-cou-tronc en cas de suspicion de traumatisme rachidien.

Objectifs de l'immobilisation

- Prévenir l'aggravation des lésions médullaires.
- Assurer un transport sécurisé vers une structure médicale.
- Maintenir l'alignement de l'axe tête-cou-tronc.

Indications

- Traumatisme crânien ou suspicion de lésion cervicale.
- Chute de hauteur, accident de la voie publique (AVP).
- Douleurs dorsales après un choc violent.

Matériel

- Plan dur rigide.
- Collier cervical.
- Sangles de fixation ou attelles araignée.
- Appui-tête ou blocs de tête avec sangles.

Technique d'immobilisation

1. Sécurisation de la zone

- Évaluer les risques avant intervention.
- Maintenir manuellement la tête.

2. Pose du collier cervical

- Adapter la taille du collier.
- Maintenir l'alignement tête-cou-tronc.

3. Mobilisation vers le plan dur

- Technique du pont (3 secouristes) : Soulèvement en bloc pour glisser le plan dur.
- Technique du retournement en monobloc(4 à 5 secouristes) :
 - Maintien strict de la tête.
 - Rotation synchronisée sur le côté.
 - Glisser le plan dur avant repositionnement.

4. Fixation de la victime

- Placer des blocs de tête et fixer avec une sangle frontale.
- Attacher les sangles thoraciques, pelviennes et des jambes.
- Vérifier l'absence de points de compression.

Précautions

- Mobilisation uniquement par une équipe formée.
- Surveillance des fonctions vitales.
- Vérification de l'état neurologique de la victime.

Besoin d'une [atelle bras](#) ? Commandez-le directement sur [smssp.fr](https://www.smsp.fr).

Caractéristiques techniques

Marque	SMSP
Conforme 10g	Non
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Etanche	Non

Photos

