



[Fiche technique]

Pansement compressif israélien stérile First Care Blanc - Lot de 10

Réf. 304259



LOT

10

Le lot de 10 permet d'être prêt dans les cas de nombreuses victimes (novi).

Le produit est applicable d'une seule main et permet d'intervenir dans des zones difficiles d'accès.

Application du pansement compressif israélien stérile First Care – Blanc (Lot de 10)

Contexte d'utilisation

Le pansement compressif israélien First Care blanc est conçu pour le traitement rapide des hémorragies externes, notamment en situation d'urgence préhospitalière ou d'intervention en contexte dégradé (accident, catastrophe, attentat, situation de nombreuses victimes).

Indications principales :

- Hémorragies sur les membres, le cuir chevelu, le thorax ou l'abdomen (hors plaies thoraciques pénétrantes)
- Contrôle hémorragique sans recours au garrot ou en complément d'un pansement hémostatique
- Remplacement d'un pansement improvisé ou non stérile

Étapes d'application

1. Mettre des gants de protection.
2. Placer la compresse stérile directement sur la plaie.
3. Enrouler la bande autour de la zone blessée.
4. Utiliser le dispositif de compression intégré (barrette plastique) pour exercer une pression directe sur la plaie.
5. Maintenir la bande fermement en utilisant le système de verrouillage prévu à cet effet.
6. Vérifier la circulation distale si la plaie est sur un membre, et noter l'heure de pose.

Avantages du modèle First Care – Blanc

- Pansement stérile, adapté aux soins d'urgence immédiats avec réduction du risque infectieux

- Auto-applicable par la victime si celle-ci est consciente et formée
- Système de compression intégré assurant une pression constante et efficace
- Format conditionné par lot de 10, idéal pour la constitution de lots d'intervention ou de sacs de secours

Utilisation en contexte NoVi (Nombreuses Victimes)

Le pansement compressif First Care est particulièrement adapté aux contextes de tri et de gestion d'un grand nombre de blessés. Il permet une intervention rapide, sans surveillance constante, et constitue une solution efficace pour le contrôle initial des hémorragies en situation de ressources limitées.

Il peut être utilisé seul ou en complément d'un pansement hémostatique et représente une alternative au garrot dans les cas où ce dernier n'est pas indiqué (plaie sur le tronc, garrot impossible à poser).

Stop the bleed a-t-il une équivalence en France?

En France, il n'existe pas à ce jour d'équivalent officiel strictement comparable à l'initiative américaine Stop the Bleed, notamment en termes de nom, de campagne nationale ou de standardisation unique autour du contrôle des hémorragies massives par le grand public.

Cependant, de nombreuses formations de premiers secours intègrent des modules proches, tant dans les objectifs que dans les techniques enseignées. Parmi celles-ci :

- Le PSC (Prévention et Secours Civiques) inclut l'apprentissage de la compression directe, du pansement compressif et de l'usage du garrot.
- Les formations de type "Gestes qui sauvent", organisées par les préfetures, les pompiers ou les associations agréées, proposent également une sensibilisation au contrôle des hémorragies.
- Des modules plus avancés, comme ceux proposés dans les formations aux secours en milieu hostile (TACTICAL / MATC), aux primo-intervenants, ou en milieu professionnel à risques, abordent également le contrôle des hémorragies massives, souvent selon des protocoles inspirés de Stop the Bleed.

En résumé, même si l'appellation "Stop the Bleed" n'est pas reprise en France, l'esprit et les techniques de cette initiative sont bien présents dans diverses offres de formation, adaptées à différents publics (citoyens, secouristes, agents de sécurité, professionnels de santé).

Si vous souhaitez connaître le détail des caractéristiques du [pansement israélien](#), consulter le lien.

Caractéristiques techniques

Couleur	Ecrue
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Lot de 10
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	304259
Etanche	Non

Photos



lot de 10 pansements israélien pour
hémorragie externe

capacité de la bande du pansements
israélien

dimensions pansements israélien