



[Fiche technique]

Papier indicateur de pH

Réf. 114114

Permet de mesurer facilement le pH urinaire ou salivaire.

- Bandelette PH avec échelle de teinte (plage de 1 à 14) permettant de tester rapidement et simplement différentes solutions.
- Permet de déterminer le caractère acide ou basique d'une solution.
- Mesure facile du pH de l'urine et de la salive.
- Le papier vire au rouge sous l'influence d'un acide (pH inférieur à 7).
- Le papier vire au bleu sous l'influence d'une base (pH supérieur à 7).
- Il se présente sous la forme d'un rouleau de 5 mètres de long et permet de mesurer le pH de 1 à 14.
- Grâce au papier indicateur de pH, vous pouvez tester l'équilibre acido-basique de votre organisme.

Comment utiliser le papier indicateur de pH ?

1. Couper un petit bout de papier pH en faisant attention de ne pas le manipuler avec les doigts.
2. Déposer une goutte de liquide à mesurer (urine ou salive), ou plonger une extrémité de papier dans le liquide.
3. Noter immédiatement le changement de la coloration du papier et comparer avec le pH indiqué par l'échelle colorimétrique de la boîte.

Caractéristiques techniques

Dimensions	5 m
Couleur	Blanc, Bleu
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	107238