



[Fiche technique]

Poche de gel froid chaud réutilisable

Réf. 304806 - 304807 - 304808


3 TAILLES

Permet de soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires.

Convient pour de nombreuses utilisations : médical, dentaire, sportif...

3 tailles au choix: 11x11cm, 14x18cm, 17x26cm

- Poche gel chaud froid réutilisable. Convient pour une utilisation médicale et chez-soi.
- Utilisée à chaud : soulage les rhumatismes, torticolis et lumbagos par exemple. Traite également une hypothermie.
- Utilisée à froid : soulage naturellement des douleurs liées aux traumatismes, aux hématomes ou des entorses.
- Emmagasine facilement le chaud dans un micro-ondes ou dans un récipient d'eau chaude.
- Le froid est accumulé dans un congélateur.
- Cette poche de froid réutilisable non toxique

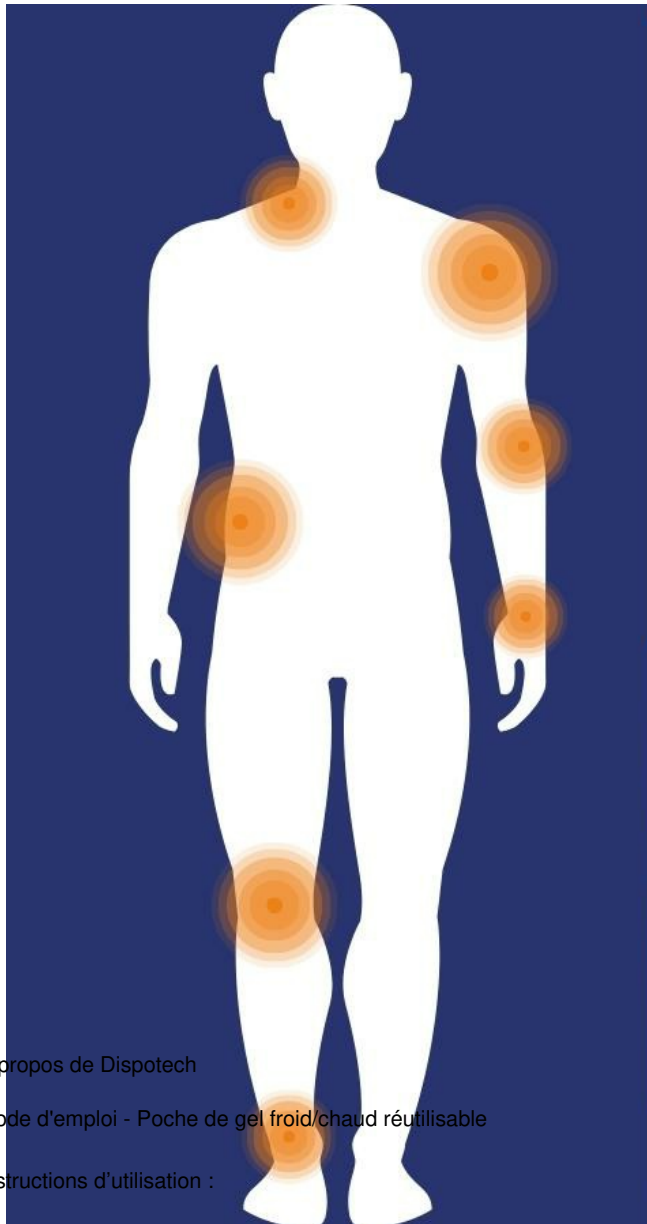

peut aussi être utilisée pour soigner une hyperthermie et comme cryothérapie.

- Vous trouverez également la poche de froid instantané prête à l'emploi à usage unique, très utilisée par les secouristes.
- SMSP dispose de poche de chaud pour le soulagement des douleurs musculaires.

A propos de Dispotech

Mode d'emploi - Poche de gel froid/chaud réutilisable

Instructions d'utilisation :

1. Utilisation pour le froid (congélation) :

- Placez la poche de gel au congélateur pendant au moins 2 heures.
- Avant application, insérez la poche dans une pochette ou un linge pour protéger la peau.

2. Utilisation pour le chaud (eau bouillante) :

- Plongez la poche de gel dans une casserole d'eau bouillante pendant 5 minutes maximum.
- Retirez-la avec précaution, séchez-la, puis placez-la dans une pochette ou un linge avant application.

3. Utilisation pour le chaud (four à micro-ondes) :

- Placez la poche de gel au micro-ondes à 650 W pendant 1 minute maximum.
- Retirez la poche de gel avec précaution et insérez-la dans une pochette ou un linge avant de l'appliquer.

Précautions d'emploi :

- Toujours envelopper la poche dans un tissu ou une pochette (non incluse) pour éviter tout risque de brûlure ou de gelure.
- Avant utilisation chez les bébés, les enfants, les personnes âgées ou les patients souffrant de diabète, maladies cardiovasculaires, ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud), consultez un médecin.

Informations complémentaires

Ne pas ingérer le contenu, ne pas casser le sachet.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Envelopper toujours le sachet dans une pochette (non incluse) ou dans un tissu pour éviter les risques de brûlures.

Avant d'utiliser le sachet sur les bébés, les enfants ou les personnes âgées ou en cas de diabète ou maladie cardiovasculaire et/ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud) il est impératif de consulter le médecin.

Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. En cas de doute sur le traitement à utiliser, consulter votre médecin. Ne pas appliquer sur la peau endommagée. Pour usage externe uniquement.

Caractéristiques techniques

Marque	Dispotech
Couleur	Bleu Roi
Utilisation	Réutilisable
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	Pour une utilisation au congélateur : Placer la poche de gel au minimum 2h au congélateur puis l'insérer dans une pochette ou dans un linge avant d'appliquer sur la zone. Pour une utilisation dans l'eau bouillante : Plonger la poche de gel dans l'eau bouillante pendant 5 mn maximum. Retirer le sachet de l'eau, le sécher et le mettre dans une pochette ou dans un linge avant d'appliquer sur la zone douloureuse. Pour une application au four à micro-ondes: Placer la poche de gel dans le four à micro-ondes à 650 W pendant 1 mn maximum. Retirer la poche de gel et la placer dans une pochette ou dans un linge. Envelopper toujours le sachet dans une pochette (non incluse) ou dans un tissu pour éviter les risques de brûlures. Avant d'utiliser le sachet sur les bébés, les enfants ou les personnes âgées ou en cas de diabète ou maladie cardiovasculaire et/ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud) il est impératif de consulter le médecin.
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 304806	Poche de gel froid / chaud réutilisable 11 x 11 cm
Réf. 304807	Poche de gel froid / chaud réutilisable 14 x 18 cm
Réf. 304808	Poche de gel froid / chaud réutilisable 17 x 26 cm

Photos



3 TAILLES

Poche de gel froid chaud réutilisable
 cryothérapie thermothérapie 3 tailles
 disponibles



Poche de gel froid chaud réutilisable
 thermothérapie cas d'usage



DIMENSIONS

Poche de gel froid chaud réutilisable
 dimension



Poche de gel froid chaud réutilisable
 application cryothérapie



DIMENSIONS

Poche de gel froid chaud réutilisable



DIMENSIONS

Poche de gel froid chaud réutilisable