



[Fiche technique]

## Fausse plaie - Doigt sectionné

Réf. 333026

**L'image représentée fait figurer le résultat final d'une fausse plaie. A combiner avec gamme de maquillage secourisme : pinceau, dissolvant, fard**

- Maquillage blessure réaliste : fabriqué dans un matériau souple avec des bordures fines et transparentes permettant des formations particulièrement proche du réel.
- Maquillage SST et PSC1 facile à positionner (seulement 1 minute pour l'appliquer), pas de perte de temps à la préparation.
- Longue tenue : de 6 à 8 heures
- Résiste à l'eau
- Réutilisable
  
- Appliquer du maquillage sur la fausse plaie pour simuler une blessure réaliste pendant vos formations de secourisme.

## Informations complémentaires

Plaies réutilisables.

Voici le matériel dont vous aurez besoin pour rendre la plaie encore plus réaliste :

- Latex liquide (Ref.333304)
- Fard crème jaune – bleu – rouge (Ref.333300)
- Plasto nat (Ref.333306)
- Pinceau (Ref.333320)
- Faux sang gélifié (Ref.333301)
- Sang artificiel (Ref.333032)
- Dissolvant (Ref.333318)

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Caractéristiques produit</b>	Plaies réutilisables.
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Stérile</b>	Non sterile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Garantie</b>	1
<b>Instructions d'utilisation</b>	Réalisation du maquillage : Étape n°1 : Appliquer une fiche couche de latex sur la 2ème phalange du majeur Étape n°2 : Faire un cylindre de Plasto-Nat de la taille de la phalange Étape n°3 : Colorer le doigt avec du Fard jaune Étape n°4 : Appliquer sur la bordure de la partie à couper du Fard bleu puis superposer du Fard rouge. Positionner le cylindre de Plasto-Nat en continuité de la phalange Étape n°5 : Etirer le Plasto-Nat du centre vers l'extérieur Étape n°6 : Colorer l'intérieur du cratère avec le pinceau et du fard rouge sans colorer les lèvres du Plasto-Nat Étape n°7 : Remplir le cratère de sang gélifié et recouvrir les bords du Plasto-Nat
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 333300 - Fard crème pour maquillage de secourisme - Palette de 10 couleurs Réf. 333301 - Faux sang gélifié Maqpro Réf. 333304 - Latex liquide - Flacon de 60 Réf. 333306 - Plasto-Nat 35 ml Réf. 333316 - Plasto-Nat 200 ml Réf. 333318 - Dissolvant pour colles et latex - Flacon de 60ml Réf. 333320 - Pinceau maquillage pro N°2 Réf. 333321 - Pinceau maquillage pro N°6 Réf. 333032 - Faux sang normal Maqpro 125ml



# Photos





Fausse plaie Doigt sectionné réutilisable pour formation psc avec simulation doigt coupé



comment faire un maquillage de simulation de doigt coupé ?

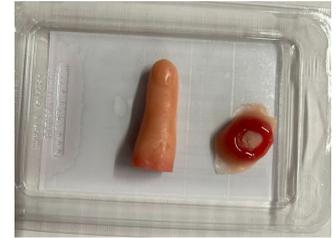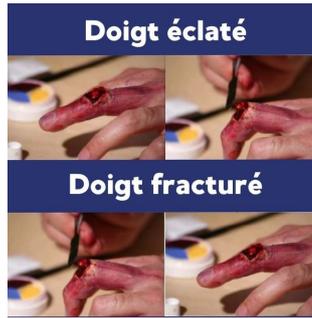

prothèse doigt coupé

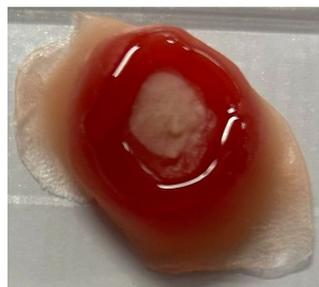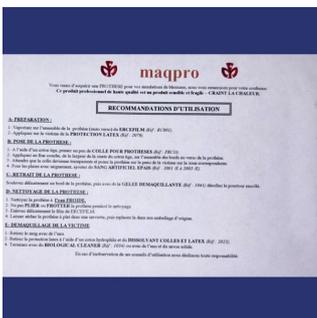

entretien prothèse fausse plaie pour formation securisme