



[Fiche technique]

Surfa Safe Premium Anios EN14476 - Aerosol 750ml

Réf. 120052

Nettoyant et désinfectant en 1 seule opération. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et équipements médicaux.

- Spray mousse détergente et désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection de toutes surfaces (matériel médical, paillasse) et dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs.
- Efficacité antimicrobienne rapide.
- Recommandé contre le coronavirus (norme EN14476).
- Produit sans substance CMR, sans alcool, sans parfum et sans colorant.
- Surfa Safe Premium de séchage rapide et sans trace sur les surfaces.
- Pulvérisateur à capot rouge pour mousse diffuse.

Mode d'emploi :

- Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface;
- Répartir la mousse sur la surface à traiter en respectant le temps de contact en fonction de l'activité antimicrobienne recherchée;
- Laisser sécher;
- Ne pas rincer : sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.
- Découvrez également le désinfectant [surfanios premium](#).

Besoin de la [dilution aniosyme x3](#) ? Il est présent dans notre catalogue sur [smsp.fr](#).

Informations complémentaires

Séchage rapide et sans trace des surfaces.

Formule permettant une large compatibilité avec les matériaux.

pH : 6 (à +/- 0,5).

Stockage entre +5°C et +25°C.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide

Levuricide

Tuberculocide

Virucide

Flacon capot rouge avec dispenseur de mousse.

Caractéristiques techniques

Marque	Anios
Caractéristiques produit	Séchage rapide et sans trace des surfaces. Formule permettant une large compatibilité avec les matériaux. pH : 6 (à +/- 0,5). Stockage entre +5°C et +25°C. Propriétés microbiologiques : Bactéricide Levuricide Tuberculocide Virucide Flacon capot rouge avec dispenseur de mousse.
Couleur	Rouge, Blanc
Volume	Flacon pulvérisateur de 750 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.
Unité de vente	A l'unité
Poids	830 g
Normes et Certification	EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 1275, EN 13624, EN 14476
Instructions d'utilisation	Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer. Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m2 soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires.
Classification	Non concerne
Format	Aerosol
Partie du corps	
Code SH	380894100003
Référence fabricant (MPN)	2419326

Photos



Surfa Safe Premium Anios EN14476 Surfa Safe Premium Anios EN14476 Surfa Safe Premium Anios EN14476
- Aerosol 750ml - Aerosol 750ml - Aerosol 750ml