



750ML

[Fiche technique]

Surfa Safe Premium Anios EN14476 - Aerosol 750ml

Réf. 120052



Nettoyant et désinfectant en 1 seule opération. Spray mousse pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et équipements médicaux.

- Spray mousse détergente et désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection de toutes surfaces (matériel médical, paillasses) et dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs.
- Efficacité antimicrobienne rapide.
- Recommandé contre le coronavirus (norme EN14476).
- Produit sans substance CMR, sans alcool, sans parfum et sans colorant.
- Surfa Safe Premium de séchage rapide et sans trace sur les surfaces.
- Pulvérisateur à capot rouge pour mousse diffuse.

Mode d'emploi:

- Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface;
- Répartir la mousse sur la surface à traiter en respectant le temps de contact en fonction de l'activité antimicrobienne recherchée;
- · Laisser sécher;
- Ne pas rincer: sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.
- Découvrez également le désinfectant surfanios premium.

Besoin de la dilution aniosyme x3 ? Il est présent dans notre catalogue sur smsp.fr.



Informations complémentaires

Séchage rapide et sans trace des surfaces.

Formule permettant une large compatibilité avec les matériaux.

pH:6(à+/-0,5).

Stockage entre +5°C et +25°C.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide

Levuricide

Tuberculocide

Virucide

Flacon capot rouge avec dispenseur de mousse.

Stérile



Caractéristiques techniques

Marque Anios

Caractéristiques produit Séchage rapide et sans trace des surfaces.

Formule permettant une large compatibilité avec les matériaux.

pH:6(à+/-0,5).

Stockage entre +5°C et +25°C. Propriétés microbiologiques :

Bactéricide Levuricide Tuberculocide Virucide

Non sterile

Flacon capot rouge avec dispenseur de mousse.

Couleur Rouge, Blanc

Volume Flacon pulvérisateur de 750 ml

Conforme 10g Non

Matière Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent

séquestrant, excipients.

Unité de vente A l'unité

Poids 830 g

Garantie 1

Normes et Certification EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 1275, EN 13624, EN 14476

Instructions d'utilisation Pulvériser la solution détergente désinfectante sur un non-tissé et essuyer.

Bien répartir le produit (+/- 6 ml/m2 soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour

l'activité antimicrobienne recherchée.

Le rinçage est inutile sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou

les denrées alimentaires.

Classification Non concerne

Format Aerosol

Partie du corps

Code SH 380894100003

Référence fabricant (MPN) 2419326



Photos





Surfa Safe Premium Anios EN14476 Surfa Safe Premium Anios EN14476 Surfa Safe Premium Anios EN14476 - Aerosol 750ml - Aerosol 750ml - Aerosol 750ml - Aerosol 750ml