



[Fiche technique]

Surfanios Premium - Dose de 20 ml - Lot de 1000

Réf. 120079

Nettoyage et désinfection des sols, murs et dispositifs médicaux non-invasifs

Très efficace, puissant et sans rinçage

Bactéricide, Virucide et Fongicide

Si vous souhaitez plus d'informations sur le [surfanios Premium](#), veuillez consulter la ref.120050.

- Désinfectant ANIOS à diluer bactéricide, virucide et fongicide.
- Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.
- Haute détergence de couleur verte.
- Surfanios dilution conseillée à 0.25%.
- Une fois diluée, la solution peut être conservé jusqu'à 7 jours dans un contenant fermé et 24 heures dans un contenant ouvert.
- Respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Surfanios : respecte les exigences de la réglementation européenne relative aux produits biocides destinés à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1- TP 2 & 4). Bénéficie du marquage CE en tant que Dispositif Médical de classe IIa, en conformité avec la Directive 93/42/CE.

Mode d'emploi du désinfectant surfanios Premium

- Remplir un seau avec 8 litres d'eau.
- Verser une dose de 20 ml de surfanios Premium dans le seau (dilution à 0,25%).
- Après avoir fait un balayage humide de la pièce, réaliser le lavage en respectant bien le schéma de nettoyage à savoir du fond vers la sortie.
- Le rinçage n'est pas nécessaire sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les denrées alimentaires et les muqueuses.
- Remplacer les franges autant de fois que nécessaire en mettant la frange sale dans un récipient prévu pour cet effet.
- Après le nettoyage de chaque secteur, remplacer la frange et renouveler l'opération en ajoutant la solution de lavage aux doses indiquées.

Caractéristiques techniques

Marque	Anios
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Lot de 1000
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	120079
Etanche	Non