



[Fiche technique]

Carebag Sac urinal masculin avec substance absorbante - Boîte de 20

Réf. 304771



SACS

20

Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.

Boîte de 20

Urinal masculin idéal lors des voyages permettant d'uriner à tout moment et discrètement.

Urinal pour homme avec tampon super-absorbant anti-odeurs.

De plus ce tampon permet de gélifier les matières et urines pour limiter considérablement les risques de fuite.

Sac urinal jetable à usage unique avec cordon de serrage coulissants.

Ce dispositif peut être également utilisé comme substitut au urinal masculin en plastique. Très pratique en milieu hospitalier, en urologie et en centres de dialyse car pas besoin de nettoyer.

Informations complémentaires

Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%.

Avec cordons de serrage coulissants.

Caractéristiques techniques


Marque	Cleanis
Dimensions	(Lxl) 38 x 16 cm. Epaisseur 40 µ
Caractéristiques produit	Haute capacité d'absorption : 450 ml de solution saline 0.9%. Avec cordons de serrage coulissants.
Couleur	Blanc
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Sac en polyéthylène basse densité (PEBD) muni de doubles cordons de serrage. Tampon super-absorbant : support non-tissé à base de fluff (cellulose) et de Polymère Super-Absorbants (SAP)
Unité de vente	Lot de 20
Instructions d'utilisation	Mode d'emploi : 1. Ouvrir la boîte et prendre un sac 2. Déplier le sac, l'ouvrir et le tenir avec les mains 3. Uriner dans le sac 4. Attendre que le contenu (+/-450 ml max) soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ 5. Pour fermer, tirer les cordons de chaque côté du sac, c'est-à-dire bleu sur un côté, blanc de l'autre puis nouer Elimination : Risque de pollution après incinération : conforme à la législation. Aucun rejet de dérivé chloré propre à la formation de dioxine.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	5603149090
Référence fabricant (MPN)	7733993
Etanche	Non

Photos



SACS 20

sac collecteur urine capacité 450ml
boîte de 20 sac urinal super
absorbant

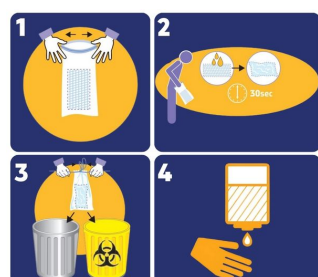

UTILISATION

utilisation sac à urine



CORDON DE SERRAGE

sac à urine avec fermeture par
cordon de serrage



cas d'usage d'un sac à urine carebag