



[Fiche technique]

Aniospray Désinfectant de surface à pulvériser éthanol 29%

Réf. 501587 - 970069



Pourcentage d'éthanol de l'aniospray: 29%

Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus.

Rapide à déployer: ne nécessite pas de dilution

Quelle est la composition de l'aniospray? Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 226 mg/g) Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 0.64 mg/g), Chlorure de didécyltriméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 0.53 mg/g) Excipients Anios crée des produits désinfectants de grande qualité. Avec 120 ans d'expérience et de savoir-faire dans l'hygiène, Anios est membre d'Ecolab, et les chiffres parlent d'eux-mêmes : 120 usines dans le monde 45 000 collaborateurs présence dans 170 pays et, 19 centres de recherche. Le catalogue Anios propose une gamme complète pour l'hygiène des mains, avec des désinfectants et des savons. Chaque produit a une formule brevetée pour une efficacité optimale, et les certifications Anios, comme l'ISO9001, l'ISO13485 et l'ISO 22301, attestent de leur engagement envers des normes de qualité strictes. Les produits Anios sont le choix de confiance pour assurer la propreté.

Mode d'emploi

- Nettoyez la pièce avec un détergent désinfectant.
- Pulvérisez sur les surfaces verticales, les dispositifs médicaux et le mobilier, en avançant du fond de la pièce jusqu'à la sortie.
- Laissez agir 5 minutes minimum, pièce fermée. Aérez avant réutilisation si possible.
- Ne rincez pas, sauf pour les zones en contact avec la peau ou les muqueuses.

En quête de la [dilution anios](#) ? Consultez notre fiche produit sur smsp.fr.

Informations complémentaires

Pourcentage d'éthanol : 29% v/v.
pH à +20°C : environ 5.5
Compatible avec tous types de matériaux.
Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus.
Durée de vie : 3 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Anios
Couleur	Incolore
Conforme 10g	Non
Matière	Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 226 mg/g), Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 0.64 mg/g), Chlorure de didécylidiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 0.53 mg/g), excipients.
Normes et Certification	NF T 72-281 EN1040, EN 13727, EN 13697, EN 1275, EN 13624
Instructions d'utilisation	Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant. Pulvériser les surfaces verticales et des dispositifs médicaux puis le mobilier du fond de la pièce jusqu'à la sortie. Laisser la pièce fermée pendant 5 min minimum. Aérer si possible avant réutilisation. Le rinçage est inutile sauf si les zones à traiter sont destinées à être en contact avec la peau ou les muqueuses.
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Partie du corps	
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 970968 - Pistolet vaporisateur pour Aniospray Surf 29

Références

Réf. 970069	Aniospray Surf 29 flacon 1L Caractéristiques produit : sans pulvérisateur
Réf. 501587	Aniospray Surf 29 bidon 5L Caractéristiques produit : sans pulvérisateur

Photos



2 choix désinfectant surfaces
antimicrobien laboratoires anios



désinfectant surface 1L
laboratoires anios



désinfectant surface 5L
laboratoires anios



comment désinfecter une
surface



DISPONIBLE  **SMSp.fr**

accessoire pulvérisateur
Aniospray Désinfectant de
surface