



[Fiche technique]

Aniosyme DD1 ANIOS - La dose de 25 ml

Réf. 120220

Aniosyme dd1 très efficace pour nettoyer et désinfecter les instruments médico-chirurgicale.

Produit détergent ANIOS convenant également à du matériel d'endoscopie avant stérilisation.

L'aniosyme est à diluer dans de l'eau pour un nettoyage en bac à ultrasons.

Utilisable en bac à ultrasons. pH neutre.

Solution parfumée de couleur bleue.

Dilution conseillée à 0,5 %.

Temps de trempage : 5 mn.

Informations complémentaires

Utilisable en bacs à ultra-sons.

Son pH neutre en fait un produit pré-désinfectant qui convient pour une utilisation sur les instruments fabriqués en alliages d'aluminium.

Dilution 25ml d'Aniosyme DD1 pour 5 litres d'eau.

Stockage de +5°C à +35C.

Dispositif médical de classe IIb.

Propriétés microbiologiques > Actif sur :

Bactéries : EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : albumine et érythrocytes SARM (EN 13727)

Mycobactéries : Mycobacterium tuberculosis (B.K.)

Levures : EN 1275, EN 13624

Virus : HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus

Caractéristiques techniques

Marque	Anios
Unité de vente	La dose de 25 ml
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2b