



[Fiche technique]

Aspi venin - Pompe a venin

Réf. 970480

**Pompe à vide livrée avec 3 ventouses 10mm, 22mm, 3ème ovale
Succion de 800 millibars, l'équivalent de 10x la succion buccale**

ASPIVENIN est le produit idéal pour facilement et rapidement éliminer de manière hygiénique et indolore le venin injecté par un animal ou un insecte venimeux.

Pompe aspirante à venin efficace sur :

Les piqûres de guêpe, abeille, frelon, moustique, araignée, scorpions, aoûtat, vive, rascasse ... ;




Les morsures de serpent ...

Les démangeaisons dues à certaines plantes urticantes

L'ASPIVENIN est simple d'utilisation, la victime peut s'auto-utiliser avec une seule main.

Très pratique à transporter grâce au coffret de rangement en plastique


Livré avec 3 embouts de tailles différentes.

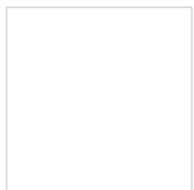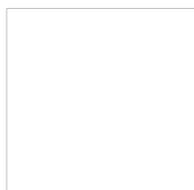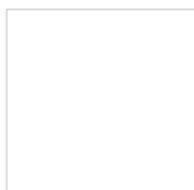

Une fois l'embout choisi et correctement positionné, tirer sur la tige blanche. Complètement pour un adulte, à moitié pour un enfant.

Positionnez l'Aspivenin d'une seule main

Enfoncez la tige blanche à fond. Laissez agir de 20 secondes à 3 minutes en fonction du type de morsure / piqûre.

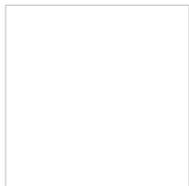

Soulevez la tige blanche.

Durée de vie indicative 1500 pressions

Pensez à utiliser la [bombe anti frelon longue portée](#) pour vous protéger des piqûres de guêpes.

Informations complémentaires

Les ventouses se lavent à l'eau savonneuse.

Caractéristiques techniques

Livré avec

3 embouts de tailles différentes et un coffret plastique de rangement

Instructions d'utilisation

Placez sans forcer l'embout le mieux adapté au type et à l'emplacement de la piqûre ou morsure puis armez la pompe en tirant le piston à fond (à moitié pour un enfant).

Placez la pompe ASPIVENIN® muni de son embout sur la blessure en le tenant d'une seule main.

Enfoncez le piston bien à fond et en fin de course vous ressentirez une aspiration puissante.

Vous laissez alors la pompe ASPIVENIN® agir pendant 20 secondes à 3 minutes (adapter le temps d'aspiration selon les piqûres ou morsures, se reporter à la notice d'utilisation).

Cette durée peut-être prolongée ou renouvelée sans inconvénient surtout dans les cas graves.

Soulevez ensuite le bouton du piston de la pointe du pouce pour retirer la pompe ASPIVENIN®.

Nous vous conseillons de manipuler votre pompe anti-venin avant d'en avoir l'utilité en consultant la notice. Nous vous conseillons également de la conserver à portée de main si vous vous trouvez dans un environnement à risque.

Pour une efficacité maximum de la pompe anti-venin ASPIVENIN®, il est recommandé de l'utiliser dans les 3 minutes qui suivent la piqûre / morsure et de respecter les temps d'aspirations indiqués.

Entretien

Les ventouses se lavent à l'eau savonneuse.

Classification

Dispositif médical de Classe 1

Photos



Aspi venin avec plusieurs embouts



Pompe a venin



Aspi venin