



[Fiche technique]

Bactinyl - Désinfectant de surface en spray moussant

Réf. 970442

- Bactinyl prêt à l'emploi permettant de nettoyer et désinfecter tout matériel médical : instrumentations, dispositifs non invasifs, équipements médicaux.
- Activité bactéricide, levuricide, sporicide et virucide (pour en savoir plus, consulter les caractéristiques techniques).
- Bactinyl spray compatible avec des surfaces alimentaires.
- Désinfectant surface sans parfum et sans colorant.

Mode d'emploi :

- Pulvériser uniformément le Bactinyl sur les surfaces à nettoyer et désinfecter (la mousse s'estompe rapidement pour faciliter l'essuyage).
- Laisser sécher : ne pas rincer sauf en cas de contact avec des surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Informations complémentaires

Aspect : liquide incolore

Densité : = 1

pH du produit : base faible

Péremption : 2 ans

Activité bactéricide : EN 13727 (conditions de saleté - 1 min - 20°C), EN 14561 (conditions de saleté - 5 min - 20°C)

Activité levuricide : EN 13624 (conditions de saleté - 1 min - 20°C), EN 14562 (conditions de saleté - 15 min - 20°C)

Activité sporicide : EN 13704 sur Bacillus Subtilis et Clostridium difficile (conditions de propreté - 60 min - 20°C)

Activité virucide : EN 14476 sur PRV*, BVDV*, H1N1, Herpès, Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de saleté - 5 min - 20°C), Norovirus (conditions de saleté - 15 min - 20°C), HIV (conditions de saleté - 60 sec - 20°C)

* Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) sont des substituts pour HBV et HCV.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gamme | EN14476 |
| Unité de vente | Flacon pulvérisateur de 750ml |
| Normes et Certification | Dispositif médical de classe 2a. Conforme à l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99, concernant les produits pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. |
| Instructions d'utilisation | <p>Pulvériser uniformément sur les surfaces à nettoyer et désinfecter. La mousse s'estompe rapidement pour faciliter l'essuyage. Laisser sécher. Ne pas rincer sauf en cas de contact avec des surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.</p> <p>Températures de stcokage : de 4 à 35°C. Ne remplace pas une désinfection par trempage. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.</p> |