



[Fiche technique]

Base pour immobilisateur de tête SpeedBlocks

Réf. 508512

Matériel permettant de remplacer la partie de la base de limmobilisateur de tête SpeedBlocks.

Cette base pour immobilisateur de tête est d'un grand confort pour l'utilisateur avec son coussinet de tête.

Constituée de 3 sangles pour une fixation optimale sur le plan dur : 2 latérales et 1 en son haut.



Caractéristiques techniques

Marque Laerdal

Dimensions (Lxlxh) 40,5 x 22 x env 3 cm

Couleur Bleu

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière

Unité de vente A l'unité

Garantie 1

Normes et Certification Dispositif médical de classe 1.

Entretien Nettoyage et préparation à la réutilisation

1. Séparer les pièces

Détacher les blocs de la base et retirer la base du brancard rigide. Jeter tout coussinet de bloc, courroie pour la tête ou coussinet de la base qui a été contaminé par des liquides corporels. On peut réutiliser la base et les blocs après les avoir nettoyés soigneusement..

2. Frotter et faire tremper

Frotter les pièces dans une solution 16:1 d'eau à 38 °C et de détergent à vaisselle pendant 4 minutes. Rincer les pièces à l'eau propre à une température de 38 °C. Faire tremper les pièces dans une solution 100:1 (concentration de 0,5 %) d'eau à 38 °C et d'agent de blanchiment domestique pendant 10 minutes..

3. Rincer et laisser sécher

Rincer les pièces à l'eau propre à une température de 38 °C et les laisser sécher complètement à l'air à température ambiante (environ 21 °C)..

4. Poser les coussinets

Poser les courroies et les coussinets de rechange, au besoin.

5. Remettre la base en place

Remettre la base en place sur le brancard rigide et ranger les blocs.

Classification Dispositif medical de classe 1

Partie du corps

Code SH 90219090

Référence fabricant (MPN) 983060

Etanche Non

Poids du produit 0.258

Accessoires et Consommables Réf. 508511 - Sangles et coussinets pour immobilisateur de tête Speedblocks®

Réf. 508513 - Blocs latéraux pour immobilisateur de tête Speedblocks