



[Fiche technique]

Cardio First Angel aide compression RCP

Réf. 290340

Simple et rapide d'utilisation

Permet d'effectuer un massage cardiaque efficace

Très petit et léger, toujours à porter de main en cas d'urgence

- En France, 60 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque : c'est 10 fois le nombre de morts sur la route.
- En cas d'arrêt cardiaque, au delà de 4 minutes sans irrigation sanguine, le cerveau peut souffrir de séquelles graves. Il faut donc agir vite.
- La [formation arrêt cardiaque](#) est une étape cruciale pour sensibiliser le public aux gestes de réanimation cardiaque, permettant ainsi de maximiser les chances de survie en cas d'urgence.
- Le Cardio First Angel permet de réaliser un massage efficace selon les normes ERC sur toute personne âgée de plus de 16 ans, grâce à :
 - un placement optimal : sa forme spécifique facilite le positionnement des mains pour une bonne pression, sans contact direct avec le patient.
 - une pression optimale : un "clic" sonore indique que la force de compression est atteinte (41kg). Ensuite, relâcher pour la décompression jusqu'au "clac".
 - une fréquence optimale : à la fin de la décompression, vous pouvez entendre un "clac" indiquant qu'une nouvelle compression peut être effectuée, au rythme de 100 à 120 compressions/mn.
- Très facile d'utilisation : aucune formation n'est nécessaire pour utiliser le Cardio First Angel. Il suffit simplement de regarder les pictogrammes placés sur le dessus de l'appareil. Tout le monde peut l'utiliser.
- Intégralement mécanique : sans batterie ni pile, aucune maintenance n'est nécessaire.

Informations complémentaires

Boîte pouvant être fixée au mur. (vis non fournie)

Fabrication allemande.

Caractéristiques techniques

Dimensions	16 x 11 x 5 cm
Utilisation	Usage unique
Poids	130 g
Livré avec	boîte de rangement et de protection.
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Autres options disponibles	Signalétique à placer près de l'appareil.

Photos

