



[Fiche technique]

## **Brancard cuillère pe Ferno Scoop ® exl charge 227 kgs**

Réf. 506000-506002

### **Livré avec 3 sangles noires de maintien marquées FERNO**

Brancard cuillère relevage Ferno ultra résistante à la charge (jusqu'à 227 kg) et à l'exposition aux produits chimiques.

Solide et pratique, la conception de cette civière de relevage est réalisée en polyéthylène haute densité radiotransparent.

Rabaissement au niveau du support de tête de la civière de relevage pour un alignement optimal du rachis cervical de la victime.

Avec ses ouvertures centrales (séparation en 2 parties longitudinales), le relevage de la victime est optimal et sans manipulation.

Totalement sécuritaire, cette civière cuillère est dotée du système breveté de double verrouillage.

Nettoyage et désinfection faciles.

Dispositif médical disponible sous 2 coloris : jaune et vert armé.

Retrouvez aussi notre [brancard cuillère](#) pliable pour un stockage plus facile de votre matériel et un gain de place dans votre camion d'ambulancier.

## **Informations complémentaires**

---

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Ferno
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) Dépliée 165 à 201 x 43 x 7 cm. Pliée 120 x 43 x 8 cm
<b>Matière</b>	Polymère haute densité translucide aux rayons X, imperméable et ne conduisant ni le chaud ni le froid
<b>Unité de vente</b>	A l'unité sous carton
<b>Poids</b>	8.9 kg
<b>Charge maximale admissible</b>	227 kg
<b>Livré avec</b>	3 sangles noires de maintien marquées FERNO
<b>Normes et Certification</b>	Conforme EN 1865 DM de classe 1
<b>Instructions d'utilisation</b>	<p>La civière de relevage est munie d'un dispositif d'écartement permettant de glisser les deux parties de la civière sous le patient et de l'assembler ensuite afin de ne pas avoir à faire bouger la victime.</p> <p>Ouvrir la civière, pousser les 2 boutons vers l'extérieur. Ajuster la longueur de la civière à la taille du patient et verrouiller les boutons de réglage.</p> <p>Poser la civière à plat, dégager les boucles et les sangles, déverrouiller les extrémités. Glisser la civière sous le patient, verrouiller les extrémités, ajuster les sangles.</p>
<b>Entretien</b>	<p>Nettoyage avec un chiffon ou une brosse souple. Utiliser de l'eau propre ou du produit de nettoyage neutre.</p> <p>Désinfection avec un produit en spray ou une lingette prévus à cet effet.</p> <p>Ne pas utiliser de produit à base d'iode ou acides et basiques.</p>
<b>Accessoires et Consommables</b>	<p>Réf. 509820 - Support mural pour civière SCOOP 65 et SCOOP EXL</p> <p>Réf. 233111 - Housse de transport 128x55cm pour civière scoop® ferno</p> <p>Réf. 506012 - Articulations civière EXL</p> <p>Réf. 506011 - Kit TSL Expander - Kit d'extension pour civière Scoop</p> <p>Réf. 506014 - Immobilisateur de tete B Lock pour civière Scoop EXL</p>

## Références

<b>Réf. 506002</b>	Civière Ferno Scoop ® EXL - Jaune
<b>Réf. 506000</b>	Civière Ferno Scoop ® EXL - Vert armée

## Photos



Brancard cuillère Scoop ® EXL  
Ferno

Brancard cuillère pe Ferno Scoop  
® exl charge 227 kgs



Brancard cuillère Scoop ® EXL  
Ferno

