



2.5 cm x 50 cm



10 cm x 10 cm



20 cm x 20 cm



20 cm x 45 cm

[Fiche technique]

Comresse brulure Burnshield - Petite et moyenne surface

Réf. 307009 - 307005 - 307004 - 307006

- Refroidit instantanément la plaie
- Arrête la progression de la brûlure
- Soulage la douleur du patient
- Protège la plaie des infections

- Comresse brûlure BURNSHIELD imprégnée d'hydrogel à la melaleuca. N'adhère pas aux tissus et permet aux secouristes :
 - de refroidir instantanément la plaie,
 - d'arrêter la progression de la brûlure,
 - de soulager la douleur du patient,
 - de protéger la plaie des infections.
- Grâce à sa forte teneur en eau, l'hydrogel Burnshield refroidit et apaise en absorbant et en dissipant la chaleur, ce qui minimise les lésions cutanées.
- L'hydrogel Burnshield est un antibactérien naturel qui réduit les infections.
- Le gel est transparent, ce qui permet d'évaluer facilement la plaie.
- Non toxique et non irritant.
- Peut être utilisé sans danger pour les enfants.
- Soins brûlures hypoallergénique et facile à utiliser.
- Conditionné dans un sachet stérilisé : pratique à transporter et à ranger dans une trousse de secours brulure.
- Comresse Burnshield disponible en plusieurs dimensions.

Comment utiliser la comresse brulure Burnshield ?

1. Mettre la victime en sécurité ;
2. Enlever tous les éléments pouvant gêner la pose de la comresse (ex : vêtements, bijoux...)
3. Ouvrir le sachet pour extraire la comresse brulure ;
4. Déposer la comresse sur la zone brûlée ;
5. Utiliser tout l'hydrogel et l'étaler sur la comresse ;
6. Fixer la comresse avec un bandage non absorbant.

Informations complémentaires

Taux de stabilité -15°C +95°C

Caractéristiques techniques

Marque	Burnshield - Soins brulure
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Matière	Hydrogel : 4% Méléaleuca et gélifiant, 96% d'eau purifiée. Comresse : Polyuréthane, élastique, flexible. Emballage en aluminium multicouches.
Unité de vente	A l'unité
Instructions d'utilisation	Les informations d'utilisation claires sont indiquées sur le sachet : Ouvrir le sachet et sortir la comresse. Appliquer la comresse sur la brûlure, et la maintenir par un bandage non-absorbant.
Classification	Dispositif médical de Classe 2b

Références

Réf. 307009	Comresse brulure Burnshield - doigt 2,5 x 50 cm Dimensions : (l x L) : 5,5 x 50 cm. Sachet : 12 x 0,5 x 9 cm Poids : 46 g
Réf. 307005	Comresse brulure BURNSHIELD - 10 x 10 cm Dimensions : le sachet : 118 x 3 x 123 mm Poids : 48 g
Réf. 307004	Comresse brulure Burnshield - 20x20 cm Dimensions : le sachet : 230 x 3 x 195 mm Poids : 146 g
Réf. 307006	Comresse brulure Burnshield - 20x45 cm Dimensions : le sachet : 250 x 5 x 230 mm Poids : 150 g


Photos




Compresse brulure Burnshield pour membre



Compresse brulure Burnshield

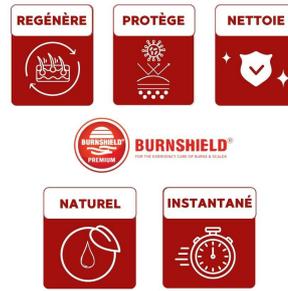

Compresse brulure Burnshield bénéfiques

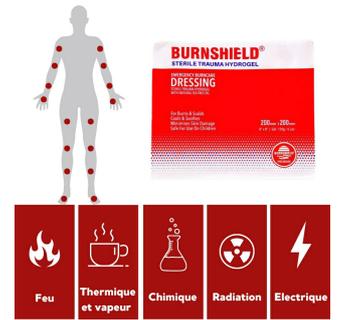

Compresse Burnshield soins brulure



Compresse brulure Burnshield pour membre



Compresse brulure Burnshield pour membre



Compresse brulure Burnshield pour membre



Compresse brulure Burnshield pour membre

Burnshield est applicable à tous les types de brûlures pendant la phase d'urgence sans restriction aux brûlures du 1er, 2ème et 3ème degrés, compte tenu de la progression significative potentielle des brûlures dans la première heure