



[Fiche technique]

Coussin hémostatique 13 cm 3 parties

Réf. 304096

Kit hémostatique stérile 3 parties.

La bande élastique avec fixation par bande velcro permet de maintenir une pression continue sur la plaie.

Le coussin hémostatique est composé de 3 parties :

- 1 Coussin mousse d'une dimension de 10x13 cm,
- 1 Bande élastique très résistante avec système de bandes velcro,
- 1 Compresse non adhérente 10x13cm.

Nous vous conseillons de porter des gants afin d'éviter toute contamination croisée.

Découvrez notre gamme complète de [pansements compressif](#) ainis que notre TOP VENTE : le [coussin hémostatique](#) coupe hemo.

Informations complémentaires

Extrémités de la bande retournées pour une plus grande solidité.

Dimensions de l'emballage : 19 x 16 x 2,5 cm

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dimensions | Bande élastique (Lxl) : 90 x 10 cm. Coussin (Lxlx) : 12,5 x 10 x 2,8 cm |
| Utilisation | Usage unique |
| Stérile | Stérile |
| Unité de vente | Sous sachet stérile |
| Poids | 110 g |
| Livré avec | 1 paire de gants 1 notice d'utilisation |
| Instructions d'utilisation | Ouvrir le sachet et dérouler la bande. Poser le coussin côté compresse sur la plaie. Appuyer fermement le coussin. Enrouler la bande autour du membre en maintenant la pression sur le coussin. Le secouriste peut désormais se libérer de la compression manuelle et traiter d'autres urgences. Contrôler régulièrement le pouls en aval de la plaie. En cas d'affaiblissement de celui-ci, relâcher la pression de la bande. |
| Classification | Dispositif médical de Classe 1s |