



[Fiche technique]

Défibrillateur de formation Powerheart G5 - Cardiac Science

Réf. 250800

DAE de formation, à coupler avec mannequin de formation RCP. Livré sans piles mais avec électrodes de formation.

Simulateur du modèle du même nom: Cardiac Science G5

DAE formation complet simulant différentes arythmies cardiaques.

Avec ce dispositif de formation à la défibrillation de CARDIAC SCIENCE, les personnes peuvent, lors de leur formation au secourisme se familiariser avec l'utilisation d'un DAE, et s'entraîner à placer les électrodes au bon endroit.

En parallèle, ils peuvent aussi apprendre à pratiquer une RCP sur un mannequin. Les instructions sonores sont parfaitement claires et intelligibles. Elles guident l'utilisateur, ainsi que le métronome.

Les électrodes de formation peuvent être réutilisées, et sont compatibles aussi bien pour des simulations sur des adultes et des enfants.

Aucun choc de défibrillation n'est délivré, il s'agit uniquement de se familiariser avec l'utilisation d'un DAE.

Défibrillateur formation performant pour des formations simples et complètes.

- Sélectionner l'un des 3 scénarios d'interventions enregistrés.
- Effectuer des simulations de sauvetage avec et sans délivrance de chocs.
- Utiliser l'appareil de RCP pour évaluer les performances vis-à-vis des directives relatives à la réanimation émises en 2010.
- Effectuer des formations à la RCP précise en se servant du métronome.
- Basculer dans un autre scénario de sauvetage en cours de séance grâce à la télécommande.
- Utiliser la fonction "pause" du défibrillateur de formation pendant une simulation d'intervention pour insister sur un point important et reprendre au même la simulation au même stade.
- Montrer le fonctionnement d'un défibrillateur automatique et semi-automatique.

L'électrode en 2 parties de ce défibrillateur de formation permet une utilisation optimale et une maîtrise des coûts : 1 partie permanente avec un adaptateur easy connect (réf. 250803 avec capteur ou 250805 sans capteur) et 1 partie pour environ une formation avec un jeu d'électrodes gélifiées (réf. 250801).

Entraînement, Exercice, Formation

On ne répétera jamais assez qu'il faut être prêt au bon moment en cas d'arrêt cardiaque. Si vous êtes titulaire d'un brevet de secouriste PSC1 ou que vous avez suivi une formation de secouriste au travail SST, vous avez eu l'occasion de pratiquer la défibrillation.

La Fédération Française de Cardiologie a publié quelques statistiques intéressantes dans son livre blanc récemment.

Sans prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques sont fatals.

7 fois sur 10, ils surviennent devant témoin, mais moins de 20 % de ces témoins font les gestes de premiers secours.

Or 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples pratiqués par le premier témoin.

Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est de 2 à 3 % ; il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et la population formée aux gestes qui sauvent.

2 Français sur 3 souhaiteraient se former aux gestes qui sauvent

Source: <https://www.cfrc.fr/documents/brochure-arret-cardiaque-1-vie-3-gestes.pdf>

Avantages spécifiques de la formation sur le Powerheart G5 :

1. Familiarisation avec l'appareil réel

- Le modèle de formation reproduit fidèlement l'interface et le fonctionnement du Powerheart G5, permettant aux secouristes d'être à l'aise avec l'équipement qu'ils retrouveront sur le terrain.
- Ils s'habituent aux instructions vocales et visuelles spécifiques de cet appareil.

2. Entraînement à l'analyse automatique du rythme cardiaque

- Le Powerheart G5 est semi-automatique ou entièrement automatique, selon la configuration.
- La formation permet de comprendre comment réagir après l'analyse du rythme et d'anticiper l'administration du choc si nécessaire.

3. Utilisation des électrodes IntelliSense CPR

- Le Powerheart G5 intègre des électrodes avec capteur de compression pour guider le secouriste sur la profondeur et la fréquence du massage cardiaque.
- La formation permet de s'exercer avec ces électrodes spécifiques et de recevoir des retours en temps réel sur la qualité des compressions thoraciques.

4. Gestion des scénarios d'urgence

- L'appareil de formation permet de simuler plusieurs scénarios d'arrêt cardiaque (choc conseillé ou non, qualité du massage cardiaque, etc.).
- Les secouristes peuvent ainsi s'entraîner dans des conditions proches du réel et améliorer leur capacité d'adaptation.

5. Optimisation du temps d'intervention

- En s'exerçant sur le Powerheart G5, les secouristes réduisent leur temps de réaction et assurent une prise en charge rapide et efficace de la victime.

6. Compatibilité avec les formations en équipe

- La formation permet de s'entraîner en binôme ou en équipe, pour mieux coordonner l'utilisation du défibrillateur avec le massage cardiaque et la gestion de la scène d'intervention.

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Dimensions	(Lxlxh) 32 x 24 x 8 cm
Couleur	Orange
Alimentation	3 piles R14 (défibrillateur) et 2 piles AAA (télécommande). Piles non fournies.
Sterile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Livré avec	1 jeu d'électrodes de formation adulte avec capteur RCP, 1 télécommande et 1 CD en plusieurs langues contenant les manuels d'utilisation
Garantie	12
Indice de protection	IP 55
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9023008090
Piles incluses	Non
Référence fabricant (MPN)	190-5020-002
Étanche	Non
Poids du produit	2.35
Accessoires et Consommables	Réf. 250802 - Electrode pédiatrique pour défibrillateur de formation G5 Réf. 250803 - Adaptateur électrode avec capteur RCP pour défibrillateur de formation G5 Réf. 250804 - Télécommande de rechange pour défibrillateur de formation Powerheart G5 Réf. 250805 - Adaptateur électrode sans capteur RCP pour DAE de formation G5

Photos

