



[Fiche technique]

Electrode défibrillateur adulte Powerheart G5 avec capteur RCP

Réf. 250900

Compatibles avec le défibrillateur automatique et semi automatique Powerheart G5.

Electrodes pour adulte avec capteur RCP (réanimation cardio pulmonaire).

Fournit un retour immédiat sur la qualité du massage cardiaque.

- Electrode adulte powerheart CARDIAC SCIENCE avec capteur permettant une aide à la réanimation cardio-pulmonaire.
- Electrodes adulte G5 compatibles avec le [défibrillateur Powerheart G5 automatique](#) et semi automatique CARDIAC SCIENCE.
- L'aide à la RCP permet de guider l'apprenant dans l'efficacité de son massage cardiaque.
- Le capteur est un boîtier qui se place sur la poitrine du patient. Il suffit simplement de placer les mains sur ce boîtier pour réaliser le massage cardiaque.
- Permet de contrôler la profondeur et la fréquence du massage cardiaque.
- Electrodes adultes powerheart G5 rcp non polarisées : permet de placer les électrodes à différents endroits sur la victime (omoplate ou sur le flanc) permettant d'éviter les erreurs et de gagner un temps précieux lors des interventions.
- La technologie brevetée Rescue Ready et le circuit intégré communiquent :
 - La présence des électrodes,
 - La fonctionnalité,
 - Le type de patient,
 - L'énergie,
 - Le protocole de la RCP,
 - La date d'expiration des électrodes.
- Pratique, la synchronisation est automatique entre le feedback, les électrodes et le DAE.
- Les électrodes adultes Powerheart sont à usage unique.
- Durée de vie : 2 ans.
- Découvrez notre gamme complète [d'électrodes défibrillateur](#).

Comment appliquer les électrodes adultes powerheart G5 avec capteur RCP ?

1. Ouvrez l'emballage des électrodes défibrillateur sans les débrancher du DAE.
2. Retirez les électrodes de l'emballage.
3. Retirez la protection en plastique bleu de la première électrode d'un geste ferme et régulier.
4. Placez l'électrode à l'un ou l'autre endroit sur la poitrine.
5. Enlevez le plastique bleu de la seconde électrode.
6. Placez l'électrode à l'autre endroit sur la poitrine.


Informations complémentaires

Durée de vie avec emballage intact : 2 ans

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Caractéristiques produit	Durée de vie avec emballage intact : 2 ans
Couleur	Orange, Bleu Clair
Modèle	Avec capteur RCP
Gamme	Powerheart G5
Conforme 10g	Non
Taille âge	Adulte
Unité de vente	La paire
Garantie	90 jours
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9018118000

Photos

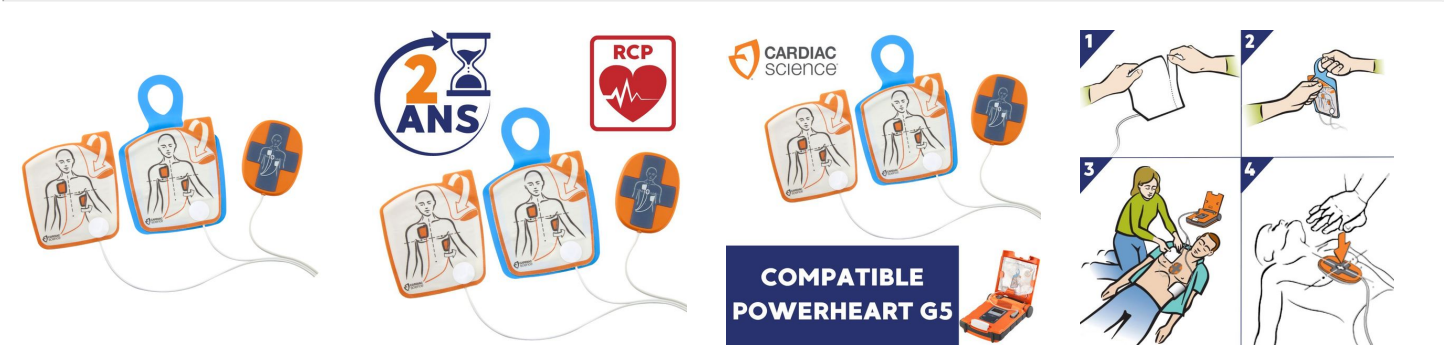

Electrode défibrillateur adulte Powerheart G5 avec capteur RCP Electrode défibrillateur adulte Powerheart G5 avec capteur RCP Electrode défibrillateur adulte Powerheart G5 avec capteur RCP



Electrode défibrillateur adulte Powerheart G5 avec capteur RCP