



[Fiche technique]

Électrodes cprd adultes Zoll aed Plus – Paire pour défibrillateur

Réf. 290294

Électrodes CPR-D adultes ZOLL AED Plus – Mode d'application

Étapes de mise en place des électrodes CPR-D

1. Sortir l'emballage
Détachez l'emballage des électrodes CPR-D de l'arrière du défibrillateur et ouvrez-le soigneusement.
2. Préparer le thorax du patient
Retirez ou découpez les vêtements recouvrant la poitrine à l'aide des ciseaux intégrés à l'emballage.
Vérifiez que la peau est propre et sèche. Si le patient présente une pilosité importante, rasez ou coupez les poils pour assurer une bonne adhésion.
3. Positionner le capteur de réanimation
Retirez le protège-adhésif et placez le capteur CPR-D (zone violette centrale) sur le sternum, au milieu de la poitrine, comme indiqué sur les illustrations de l'emballage et de l'écran du défibrillateur.
4. Appliquer les électrodes latérales
Détachez les protections adhésives des électrodes gauche et droite (vertes et bleues). Positionnez-les sur le thorax en suivant les schémas imprimés :
 - une électrode sous l'aisselle gauche,
 - l'autre sous la clavicule droite.
5. Vérification
Assurez-vous que les électrodes et le capteur sont bien appliqués sans plis ni bulles d'air.

Recommandations de sécurité

- Utilisez uniquement des électrodes neuves, issues d'un emballage fraîchement ouvert.
- N'appliquez pas d'électrodes endommagées ou desséchées.
- Une mauvaise adhésion (plis, bulles d'air, peau humide ou poilue) peut entraîner :
 - une réduction de l'efficacité du choc,
 - des brûlures cutanées,

- ou un risque d'arc électrique.

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Caractéristiques produit	Durée de vie 5 ans
Conforme 10g	Non
Garantie	1
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9018199000
Étanche	Non

Photos



Electrodes cprd adultes (la paire)
pour défibrillateur zoll



Electrodes cprd adultes (la paire)
pour défibrillateur zoll



Electrodes cprd adultes (la paire)
pour défibrillateur zoll