


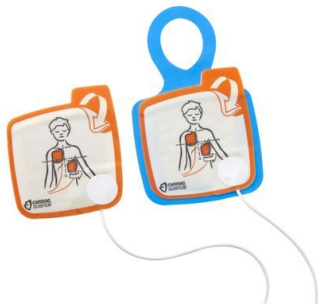

[Fiche technique]

Electrode défibrillateur enfant Powerheart G5

Réf. 250902

Indispensables pour l'utilisation de votre défibrillateur sur des enfants.

Pour les patients de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg.

Compatibles avec le défibrillateur Powerheart G5.

- Electrodes pédiatrique powerheart G5 compatibles avec le [défibrillateur G5 CARDIAC SCIENCE](#).
- Le défibrillateur Powerheart G5 reconnaît les électrodes pédiatriques G5 et se synchronise automatiquement.
- Transmission des instructions en temps réel.
- Les électrodes pédiatriques powerheart non polarisées peuvent être placées à différents endroits sur le thorax (voir indications) pour éviter les erreurs et gagner un temps précieux en cas d'intervention.
- Réducteur de puissance pour les enfants de moins de 8 ans ou 25 kg.
- Le remplacement des électrodes pédiatriques fait partie de la maintenance et de l'entretien de votre défibrillateur. Voici ce que dit le code de la santé publique dans l'article R5212-25 : "l'exploitant veille à la mise en oeuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même"
- Les électrodes adultes Powerheart G5 sont testées selon les normes internationales et conformes aux critères d'utilisation clinique.
- **Electrodes défibrillateur** à usage unique.
- Durée de vie des électrodes pédiatriques G5 : 2 ans.
- Découvrez notre [gamme complète d'électrodes défibrillateur](#).

Mise en place des électrodes pédiatriques Powerheart G5

1. Ouvrez l'emballage des électrodes défibrillateur sans les débrancher du DAE.
2. Retirez les électrodes de l'emballage.
3. Retirez la protection en plastique bleu de la première électrode d'un geste ferme et régulier.
4. Placez l'électrode à l'un ou l'autre endroit sur la poitrine.
5. Enlevez le plastique bleu de la seconde électrode.
6. Placez l'électrode à l'autre endroit sur la poitrine.

Informations complémentaires

Durée de vie avec emballage intact : 2 ans

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Caractéristiques produit	Durée de vie avec emballage intact : 2 ans
Couleur	Orange, Bleu Clair
Modèle	Sans capteur RCP
Gamme	Powerheart G5
Utilisation	Usage unique
Conforme 10g	Non
Taille âge	Enfant
Unité de vente	La paire
Garantie	90 jours
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2b
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9018199000


Photos



Electrode défibrillateur enfant
Powerheart G5



Electrode défibrillateur enfant
Powerheart G5

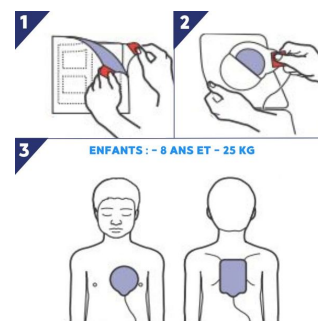

Electrode défibrillateur enfant
Powerheart G5