



[Fiche technique]

Ethylotest usage unique certifié NF - Lot de 50

Réf. 999892

- Ballon éthylotest conforme aux exigences de la directive REACH.
- Le réactif passe de la couleur blanche au rouge en cas de présence d'alcool.
- Mesure du taux à 0,5 gr/L de sang (ou 0,25mg/L d'air).
- A utiliser sans modération, pour sauver des vies et vos points de permis.



Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxlxh) 14 x 6 x 1 cm

Couleur Noir, Blanc
Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

MatièreplastiqueUnité de venteLot de 50

Instructions d'utilisation

Poids

1 - Sortir le tube, et vérifier la couleur de la pastille sur le ballon (selon la température ambiante la couleur de la pastille peut-être soit blanche soit rouge)

2 - Percuter le tube en pressant des 2 côtés,

3 - Gonfler en 1 seule fois le ballon (souffle continu et sans interruption),

4 - Insérer le tube sur le ballon,

5 - Dégonfler entièrement le ballon en 15 secondes environ puis retirer le tube,

6 - Prener le tube dans la main et le garder pendant 1 minute si la pastille sur le ballon est blanche ou 3 minutes

si la pastille sur le ballon est rouge.

7 - Lire le résultat :

12 g

si pas de coloration alors le test est négatif.

si la coloration votre tube devient rouge, alors le test est positif : VOUS NE DEVEZ PAS CONDUIRE.

Classification Se reporter aux composants

Partie du corps

Référence fabricant (MPN) 999892

Etanche Non

Poids du produit 0.01