



[Fiche technique]

Solution neutralisante oculaire Plum produits acides - Flacon 200 ml

Réf. 970473

Neutralise rapidement les projections de produits chimique dans les yeux.

Très facile d'utilisation : œillère ergonomique qui maintient l'œil ouvert.

Le pH neutre apporte un premier soin en cas de projection de produits chimiques.

- Solution pour rince oeil produit chimique à utiliser en cas de projection de produits chimiques dans les yeux.
- Le rinçage oculaire est à réaliser dans la minute qui suit l'accident oculaire.
- Le rince oeil Plum pH neutral possède le volume nécessaire pour un rinçage efficace.
- Il est préconisé d'effectuer le lavage avec la tête en arrière.
- Après utilisation du rince oeil pH neutral, il est recommandé ensuite de rincer l'oeil avec le [lave oeil Plum](#) pour corps étrangers.

- Cette solution PLUM ph neutral contient des sels de phosphate stérile (4,9%) qui neutralise rapidement les acides et bases forts.
Ainsi, rend inoffensifs toute solution chimique et évite les brûlures oculaires. Contrairement à l'eau qui elle n'a que pour effet de dilution.
- Les sels de phosphate sont naturellement présents dans le corps humain.
- Comparé au pH Neutral, une quantité d'eau 50 fois plus élevée est nécessaire pour remettre le pH à un niveau sain.

- Lave oeil très pratique à utiliser :
 - Œillère ergonomique pour une application facilitée épousant parfaitement le contour de l'oeil.
 - Flacon rince oeil au petit format idéal pour les trousse de secours et les boîtes à outils.
 - Utilisation en usage unique. Également compatible en recharge pour station murale et coffret étanche.

- A placer dans les [armoires à pharmacie](#) et [trousse de secours](#) en fonction de la nature du travail (poste mobile ou fixe).
- Découvrez notre gamme complète de lave oeil.

Informations complémentaires

Conseil : après un rinçage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage avec un lave-oeil PLUM jusqu'à intervention du médecin.

Temps de péremption : 3 ans.

Temps de lavage : env. 2 min.

Caractéristiques techniques

Marque	Plum
Caractéristiques produit	Œillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier Garantie totale de la stérilité de la solution car il faut tourner l'opercule à 360° pour ouvrir le flacon Durée de vie de 3 ans pour les flacons non ouverts
Couleur	transparent
Utilisation	Usage unique
Volume	200 ml
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	0.25 kg
Livré avec	une œillère ergonomique, un couvercle anti-poussière et une étiquette avec pictogramme d'instructions.
Instructions d'utilisation	Temps de rinçage préconisé : 2 minutes Après un rinçage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage avec un lave-oeil PLUM jusqu'à intervention du médecin
Classification	Dispositif medical de classe 1s
Partie du corps	
Code SH	3307900000
Référence fabricant (MPN)	4752

Photos

