



[Fiche technique]

Gilet de désincarcération Swangard

Réf. 753000

Le gilet Swangard permet d'immobiliser la victime pour une désincarcération en toute sécurité.

- Très facile à mettre en place, le gilet Swangard est conçu pour une désincarcération rapide.
- Grâce au gilet, la victime est en position stable.
- Facile à laver et très robuste
- Le système de ceinture innovant permet de protéger la victime.
- Réduction du risque de blessure du patient lors de l'extraction grâce au gilet qui maintient les bras attachés au corps.
- Minimum de sauveteurs requis.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Caractéristiques produit | Taille unique : le gilet s'adapte à toutes les corpulences avec son système de velcro. |
| Matière | 100% polyester |
| Livré avec | Une pochette |
| Instructions d'utilisation | <p>Tirez le gilet avec les liens bleus derrière le patient. Passez les boucles rouges en dessous des bras. Fermez le gilet autour du patient. Attachez également les bras. Accrochez le gilet au volant et serrez les sangles pour dégager le dossier. Rabattre ou retirer le dossier. Placez la planche dorsale. Desserrez les sangles du volant et placez lentement le patient en arrière sur la planche dorsale. Tirez le patient sur la planche dorsale avec les sangles rouges. Tirez le gilet sous le patient.</p> |