



[Fiche technique]

Glucomètre Vox avec fonction parlante

Réf. 210215

Lecture du résultat en 5 secondes. Moyennes glycémiques sur les 7-14-28 jours.

Livré avec 1 autopiqueur, 10 lancettes stériles, 10 bandelettes réactives, 1 solution de contrôle, 2 piles AAA, 1 carnet de suivi, 1 sac de transport

Glucomètre facile à utiliser qui permet un suivi précis et fiable de la glycémie

Test de glycémie très pratique : avec la fonction «sans codage» permettant d'éviter à l'utilisateur de calibrer son lecteur de glycémie lors d'un remplacement de flacon de bandelettes. Par conséquent, toute erreur de résultat du test de glycémie est écartée.

Spécificités de ce glucomètre de grande qualité :

- Fonction parlante avec guidage d'utilisation
- Veille automatique en cas d'inactivité
- Large plage de mesure 20-600 mg/dL
- Calcul de la moyenne glycémique sur une période de 7-14 jours.

Informations complémentaires

- Volume sanguin 0.5 µl,
- Temps de réaction d'environ 5 secondes,
- 1500 mémoires avec horodatage,
- Extinction automatique,
- Gamme de mesure 20-600 mg/dL,
- Moyenne glycémique sur 7.14 jours.

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles 1.5V AAA
Livré avec	1 autopiqueur avec embout transparent, 10 lancettes stériles, 10 bandelettes réactives, 1 solution de contrôle, 2 piles AAA, 1 carnet de suivi, 1 sacoche de transport
Garantie	4 ans
Instructions d'utilisation	Laver vos mains et le site de prélèvement, insérer une bandelette de test, choisir et inciser un site de prélèvement. Une fois l'échantillon de sang récupérer, le résultat est donné oralement 1 seule fois ; si besoin de retrouver la donnée, celle-ci est mémorisée dans le lecteur. Remplacer le capuchon du dispositif d'incision et retirer la languette usagée après utilisation.
Entretien	Nettoyé dès qu'il paraît sale, en frottant la partie extérieure du lecteur à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec soit un détergent non agressif mélangé à de l'eau ou de l'alcool isopropylique (70%) Ne jamais asperger le lecteur avec une solution nettoyante ou encore l'immerger dans un liquide Remplacer toujours les 2 piles en même temps
Classification	Dispositif médical de Diagnostic in vitro
Accessoires et Consommables	Réf. 210216 - Bandelettes pour glucomètre Vox - Boite de 100

Photos



Glucomètre VOX avec fonction
parlante 3760164736401

Glucomètre VOX avec fonction
parlante 3760164736401