



[Fiche technique]

## Humidificateur 200 ml Mediwet réutilisable

Réf. 275044

**200ML**



### Humidificateur 200 ml Mediwet réutilisable

Matériel d'oxygénothérapie conçu pour une utilisation en toute sécurité en milieu médical ou chez soi.

L'humidificateur Mediwet 2 évite le dessèchement des muqueuses du système respiratoire.

Lorsqu'un patient doit inhaler de l'oxygène, il subit un phénomène de dessèchement. En passant par le bocal préalablement rempli d'eau stérile, l'oxygène est humidifié.

## Informations complémentaires

A utiliser avec de l'eau stérile uniquement

Capacité : 100 ml d'eau minimum.

Consommation 8 ml d'eau à l'heure, à un débit de gaz.  
(oxygène ou air) de 10 l/min à 20°C.

Dimensions 190 H x 67 L (avec olive) x 57 Ø (en mm).

Poids à vide : 75 g.

Matériau : bocal polycarbonate autoclavable à 121°C.

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marque</b>                   | GCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensions</b>               | Avec olive (LxhxØ) 6,7 x 19 x 5,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Caractéristiques produit</b> | <p>Doit contenir 100 ml d'eau au minimum.</p> <p>Consommation : 8 ml d'eau à l'heure, à un débit de gaz (oxygène ou air) de 10 l/min à 20°C.</p> <p>Bocal et tube silicone autoclavable à 121°C pendant 30 min.</p> <p>Raccordement de sortie : olive crantée pour tubulure 6x9 mm (longueur conseillée : 2 m).</p> <p>Durabilité : 20 cycles d'autoclave minimum sous réserve du respect de la procédure indiquée dans la notice livrée avec le dispositif.</p> |
| <b>Couleur</b>                  | Blanc, Transparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Utilisation</b>              | Réutilisable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Conforme 10g</b>             | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Matière</b>                  | <p>Bocal Polycarbonate</p> <p>Couvercle et olive de sortie Polypropylène</p> <p>Écrou d'entrée Laiton chromé</p> <p>Diffuseur Polyéthylène</p> <p>Tuyau, joint plat Silicone</p> <p>Joint toriques Ethylène propylène</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Unité de vente</b>           | A l'unité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Poids</b>                    | 75 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Entretien</b>                | <p>Nettoyage avec de l'eau et un détergent non abrasif, sans solvant.</p> <p>Contrôle de l'intégrité de l'humidificateur et de son étanchéité à chaque mise en service.</p> <p>Remplacement mensuel des joints conseillé.</p> <p>Remplacement du diffuseur en l'absence de micro-bulles.</p>                                                                                                                                                                     |
| <b>Classification</b>           | Dispositif medical de classe 2a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Partie du corps</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Code SH</b>                  | 9026900000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Étanche</b>                  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Photos



Humidificateur 200 ml Mediwet réutilisable



dimension Humidificateur 200 ml Mediwet réutilisable



Humidificateur 200 ml Mediwet réutilisable