



[Fiche technique]

Lingettes désinfectantes Oxivir Excel CE 20x27cm - Lot de 100

Réf. 585079

Paquet de 100 lingettes pH pur 1.95

Virucide en 30 secondes

DLU courte: 19/01/2023. 47 pièces restantes

Nettoie et désinfecte efficacement un large spectre de bactéries, virus et levures avec un temps de contact réduit grâce à la technologie brevetée de Peroxyde d'Hydrogène Accélééré.

Testé selon les normes européennes de désinfection contre multiples pathogènes. Efficace contre tous les virus non-enveloppés et enveloppés selon la norme EN14476 : Poliovirus - Adenovirus - Murine norovirus - VIH - VHB - VHC - Influenza - Vaccinia virus - Coronavirus

Inodore, ce produit désinfecte en 1 minute. Sa formulation AHP douce permet d'étendre la durée de vie des produits. Il est biodégradable et non irritant pour la peau et les yeux. Les éléments actifs se décomposent en eau et en oxygène. Simple et facile à utiliser, élimine tout risque d'erreur de dosage.

Caractéristiques techniques

Marque	Diversey
Caractéristiques produit	Paquet de 100 lingettes pH (pur) : 1.95
Couleur	Incolore
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Lingettes en polypropylène
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	Règlement CE 648/2004 relatif aux détergents EN 13727 - EN 13624 - EN 14476
Instructions d'utilisation	* Respecter les préconisations du fabricant d'EPI <ol style="list-style-type: none">1. Retirer les grosses salissures2. Ouvrir le paquet de lingettes, en prendre une et le refermer3. Appliquer sur la surface, s'assurer que toute la surface est humidifiée4. Laisser agir un certain temps*5. Après le temps de contact recommandé pour la désinfection souhaitée*, rincer et laisser sécher à l'air libre6. Changer la lingette quand elle n'humidifie plus la surface, est visiblement souillée ou en cas de changement de la surface à nettoyer
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	101104774
Etanche	Non