

**STERILE****2 MODÈLES**

[Fiche technique]

## Pansement israélien compressif stérile First Care

Réf. 304250 - 304258

**Ce pansement israélien permet de stopper simplement et efficacement une hémorragie externe. Conçu pour pouvoir réaliser les soins sur soi-même à une seule main et sans assistance.**

Pansement Israélien Compressif Stérile First Care – Hémostase Rapide et Autonome

Le [Pansement](#) Israélien Compressif Stérile First Care est le standard d'excellence des bandages de compression d'urgence. Conçu pour stopper les hémorragies sévères rapidement et efficacement, il est un élément essentiel des trousse de premiers secours avancées, plébiscité par les équipes médicales, les professionnels du secourisme et les utilisateurs en milieu tactique.

Ce pansement, stérilisé par rayonnements gamma, intègre un système de compression avancé grâce à un applicateur de pression unique. Il permet de réaliser une **\*\*hémostase rapide et fiable\*\*** en quelques gestes simples. Il est disponible en version classique (Blanc) et en version militaire.

### Un Bandage de Compression Conçu pour l'Urgence (One-Hand Use)

L'avantage majeur du Pansement Israélien First Care réside dans sa conception intuitive, qui facilite l'intervention même dans des conditions de stress ou lors de soins en autonomie.

#### Sécurité et Polyvalence Clinique

- Utilisation à une seule main : Parfait pour le traitement sur soi-même ou lorsque le secouriste n'a qu'une main disponible pour l'application.
- Garrot intégré : En cas d'hémorragie extrême, le [pansement chut](#) peut être utilisé comme garrot temporaire.
- Compresse non adhérente : La compresse stérile (10 x 18 cm) évite de coller à la plaie, minimisant la douleur et le risque de dommages lors du retrait.
- Radio Transparent : Il facilite l'imagerie médicale d'urgence.

Le bandage élastique (longueur étirée de 4.4 m) assure une pression continue, essentielle pour la maîtrise de l'hémorragie.

#### Durabilité et Fiabilité Professionnelle

Choisir le Pansement Compressif Hémostatique First Care, c'est investir dans un dispositif durable, conçu pour résister aux contraintes du terrain.

- Longue Durée de Conservation : Avec une durée de vie de 8 ans, il constitue un investissement durable pour tout kit d'urgence.
- Conditionnement Stérile : Scellé individuellement, il garantit une hygiène optimale au moment de l'application.
- Résistance aux Températures : Conçu pour être stocké et utilisé dans une large plage de températures, de -10°C à 60°C.

Foire Aux Questions (FAQ) sur le Pansement Israélien First Care

#### Comment fonctionne l'applicateur de pression intégré ?

L'applicateur de pression est la pièce maîtresse du pansement compressif hémostatique. En insérant la bande élastique dedans et en la retournant, il agit comme un levier pour exercer une très forte pression mécanique directement sur la compresse et la plaie, réalisant ainsi une hémostase rapide.

### **Peut-on utiliser le Pansement Israélien sur d'autres types de [blessures](#) ?**

Oui. Bien que conçu pour les hémorragies sévères, sa conception multi-usage lui permet de traiter d'autres urgences : plaies profondes, maintien de membre ou de pansement secondaire, et même en cas de **\*\*morsures de serpent\*\*** pour limiter la diffusion du venin (après application des protocoles spécifiques).

### **Quelle est la différence entre la version Blanche et la version Militaire ?**

Techniquement, les deux modèles offrent la même performance et la même taille de compresse stérile. La version militaire est généralement emballée sous un conditionnement plus compact (emballage sous vide) et la couleur de la bande peut être verte ou kaki (couleur tactique), contrairement au modèle blanc standard, pour des raisons de discrétion sur le terrain.

### **Est-il vrai qu'il est possible de l'utiliser comme garrot ?**

Oui. Le système de forte compression et la fixation robuste permettent d'utiliser le Pansement Trauma comme un garrot temporaire d'appoint pour stopper une hémorragie massive. Cependant, il est toujours recommandé d'utiliser un garrot tourniquet certifié (comme le SOF Tactical) si disponible, pour une interruption totale du flux sanguin.

Article de  
blog SMSP:  
Arrêter un  
saignement  
:  
comprendre,  
évaluer, agir



Offrez-vous la tranquillité d'esprit en intégrant ce [Pansement israélien Compressif Stérile](#) dans votre équipement de secours.

Vous avez besoin d'une [attelle d'immobilisation cheville](#) ? Nous avons ce qu'il vous faut sur [smsp.fr](#).

**Informations complémentaires**



Stérilisation par rayonnements gamma.  
 Durée de vie 8 ans.  
 Températures de stockage : -10°C à 60°C  
 Températures d'utilisation : -10°C à 60°C

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Compresse (Lxl) 10 x 18 cm. Bande (Lxl) 4.4 m x 10 cm (longueur étirée). Longueur de la bande non étirée 180 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Stérilisation par rayonnements gamma. Durée de vie 8 ans. Températures de stockage : -10°C à 60°C Températures d'utilisation : -10°C à 60°C
<b>Stérile</b>	Sterile
<b>Poids</b>	66 g
<b>Instructions d'utilisation</b>	Placer les compresses sur les blessures et dérouler le bandage autour de la partie blessée. Insérer la bande élastique dans l'applicateur de pression. Serrer puis continuer à dérouler la bande élastique en sens inverse de façon à ce que l'applicateur de pression appuie sur la compresse. Une fois la bande déroulée, fixer le tout en insérant l'extrémité de retenue entre les couches de pansement.
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 270200 - Kit Hémorragie Externe 25 pièces pour zone non garrotable Réf. 304259 - Pansement compressif israélien stérile First Care Blanc - Lot de 10

## Références

<b>Réf. 304250</b>	Pansement compressif israélien stérile First Care - Blanc
<b>Réf. 304258</b>	Pansement israélien compressif stérile First Care - Version militaire

## Photos



Pansement israélien compressif stérile  
First Care Blanc



pansement compressif version militaire  
stérile pour hémorragie externe certifié  
iso13485 disponibles en 2 modèles




Pansement israélien compressif stérile  
First Care Blanc



Pansement israélien compressif stérile  
First Care Blanc



conditionnement du pansement israélien  
compressif stérile

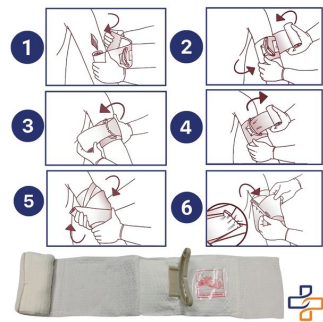

comment poser un pansement  
compressif israélien ?



Pansement israélien compressif stérile  
First Care Blanc