



[Fiche technique]

ChitoGauze XR PRO Pansement hemostatique

Réf. 304072

Bande de gaze contenant du Chitosane pliée en Z. Permet l'accélération de la coagulation du sang pour une maîtrise efficace de l'hémorragie.

Pansement imbibé de substance hémostatique

Ce pansement coagulant est très facile et rapide à appliquer, sans déchirure de la bande ni retrait du caillot formé.

Cette compresse hémostatique est scellée sous vide.

Le ChitoGauze XR PRO contient du Chitosane, un agent hémostatique permettant d'accélérer la coagulation du sang pour une maîtrise efficace de l'hémorragie.

- Convient pour la maîtrise temporaire d'une hémorragie externe suite à une blessure ouverte
- Permet d'arrêter le saignement en quelques minutes, y compris pour une hémorragie artérielle
- Réduit la perte de sang : peut permettre de limiter le besoin de transfusion

Découvrez notre large [gamme de pansement compressif](#), ainsi que notre TOP VENTE : [coussin hémostatique](#) coupe hemo.

Informations complémentaires

4 encoches sont placées aux extrémités du sachet pour une ouverture rapide.

Ne contient pas de produits d'origine animale ni de composants allergènes.

Durée de vie : 60 mois.

Scellé sous vide.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(IxL) 7,5 cm x 3,65 m (déplié)
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Unité de vente	A l'unité
Poids	20 g
Instructions d'utilisation	Recouvrir la source de saignement avec le pansement, appliquer directement une pression avec les doigts sur la source du saignement. Tasser le pansement complètement dans la cavité de la blessure ; utilisez assez de ChitoGauzeXR PRO pour remplir la blessure et être en contact avec toutes les surfaces de saignement. Appliquer une pression jusqu'à ce que le saignement soit maîtrisé ; envelopper et immobiliser le pansement sur la blessure pour maintenir la pression. Attention : si le pansement est coupé pour en obtenir un plus petit, s'assurer que l'élément radio-opaque est compris dans les parties restantes.
Classification	Dispositif médical de Classe 3