



[Fiche technique]

Pansement thoracique à valve - Beacon Chest Seal

Réf. 120105

Diamètre 15cm

Revêtement transparent, permettant de placer la compresse directement sur la plaie et s'adaptant au torse du patient

Sans latex.

Ce pansement thoracique à valve est conçu pour le traitement des plaies thoraciques ouvertes.

Il contient de l'hydrogel médical d'une extrême qualité permettant une adhésion optimale sur la plaie dans toutes les situations (Sang, sueur, poils, sable, eau, températures extrêmes).

Ce [pansement](#) pneumothorax est équipé d'une languette facilitant l'application et le retrait de la compresse.

Informations complémentaires

Durée de vie 5 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Beacon
Dimensions	Pansement déplié ø 15 cm
Caractéristiques produit	Durée de vie 5 ans.
Couleur	Transparent
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Sachet individuel
Poids	30 g
Instructions d'utilisation	Nettoyer la zone autour de la plaie. Tenir fermement l'onglet et retirer la doublure transparente. Centrez le pansement sur la plaie avec le côté adhésif vers le bas. Appuyez fermement le pansement sur la peau afin de le sceller complètement. L'onglet peut être utilisé pour aider à soulever, retirer ou replacer le pansement. Retirer le pansement en utilisant le protocole de retrait de pansement standard.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	3005100000
Référence fabricant (MPN)	EMD BCS-92594
Étanche	Non
Poids du produit	0.03