



[Fiche technique]

Papier indicateur de pH

Réf. 114114

Permet de mesurer facilement le pH urinaire ou salivaire.

- Bandelette PH avec échelle de teinte (plage de 1 à 14) permettant de tester rapidement et simplement différentes solutions.
- Permet de déterminer le caractère acide ou basique d'une solution.
- Mesure facile du pH de l'urine et de la salive.
- Le papier vire au rouge sous l'influence d'un acide (pH inférieur à 7).
- Le papier vire au bleu sous l'influence d'une base (pH supérieur à 7).
- Il se présente sous la forme d'un rouleau de 5 mètres de long et permet de mesurer le pH de 1 à 14.
- Grâce au papier indicateur de pH, vous pouvez tester l'équilibre acido-basque de votre organisme.

Comment utiliser le papier indicateur de pH?

- 1. Couper un petit bout de papier pH en faisant attention de ne pas le manipuler avec les doigts.
- 2. Déposer une goutte de liquide à mesurer (urine ou salive), ou plonger une extrémité de papier dans le liquide.
- 3. Noter immédiatement le changement de la coloration du papier et comparer avec le pH indiqué par l'échelle colorimétrique de la boite.

Grille de lecture du pH de 1 à 10 — Urine vs Salive

Valeur pH Urine — Signification possible

Salive – Signification possible



Valeur pH Urine - Signification possible Salive -Signification possible 1 à 3 Extrêmement acide - Très rare. Très acide peut indiquer une grave acidose Peu probable métabolique ou un en salive dysfonctionnement rénal sévère. humaine, pourrait signaler une pathologie sévère ou une mesure erronée. Très acide - Forte acidose, peut 4 Très acide apparaître après un jeûne, une Inflammations cétose avancée ou un régime buccales, hyperprotéiné. stress intense, digestion fortement perturbée. 5 Acide - Fréquent le matin ou en Acide cas de stress oxydatif, Digestion d'alimentation déséquilibrée ou insuffisante, d'excès de protéines animales. flore buccale déséquilibrée, début d'acidose. 6 Modérément acide - Normale Légèrement selon l'alimentation et le moment acide de la journée. Courant après les repas ou chez les personnes stressées. 7 Neutre - Indique un bon Neutre équilibre acido-basique. Idéal pour Observé après une alimentation une bonne alcalinisante (végétale). santé buccale et digestive. Reflète une bonne régulation du terrain. 8 Alcalin - Peut signaler une Alcalin infection urinaire (favorise les Parfois bactéries type Proteus), ou une observé diète très riche en légumes crus. après rinçage ou brossage des dents, ou chez des personnes très alcalines.



Valeur pH

9 à 10

Urine - Signification possible

Salive – Signification possible

Très alcalin – Rare. Peut indiquer une alcalose métabolique, une hyperventilation ou une contamination urinaire.

Très alcalin – Peu fréquent, souvent lié à une erreur de mesure ou à une stimulation salivaire non naturelle.

Caractéristiques techniques

Dimensions

5 m

Couleur

Blanc, Bleu

Stérile

Non sterile

Conforme 10g

Non

Unité de vente

A l'unité

Classification

Non concerne

Partie du corps

Référence fabricant (MPN)

107238

Etanche

Non