



[Fiche technique]

Papier indicateur de pH urinaire salivaire

Réf. 114114

Permet de mesurer facilement le pH urinaire ou salivaire.

- Bandelette PH avec échelle de teinte (plage de 1 à 14) permettant de tester rapidement et simplement différentes solutions.
- Permet de déterminer le caractère acide ou basique d'une solution.
- Mesure facile du pH de l'urine et de la salive.
- Le papier vire au rouge sous l'influence d'un acide (pH inférieur à 7).
- Le papier vire au bleu sous l'influence d'une base (pH supérieur à 7).
- Il se présente sous la forme d'un rouleau de 5 mètres de long et permet de mesurer le pH de 1 à 14.
- Grâce au papier indicateur de pH, vous pouvez tester l'équilibre acido-basique de votre organisme.

Comment utiliser le papier indicateur de pH ?

1. Couper un petit bout de papier pH en faisant attention de ne pas le manipuler avec les doigts.
2. Déposer une goutte de liquide à mesurer (urine ou salive), ou plonger une extrémité de papier dans le liquide.
3. Noter immédiatement le changement de la coloration du papier et comparer avec le pH indiqué par l'échelle colorimétrique de la boîte.

Grille de lecture du pH de 1 à 10 — Urine vs Salive

Valeur pH

Urine – Signification possible

Salive –
Signification possible

Valeur pH	Urine – Signification possible	Salive – Signification possible
1 à 3	Extrêmement acide – Très rare, peut indiquer une grave acidose métabolique ou un dysfonctionnement rénal sévère.	Très acide – Peu probable en salive humaine, pourrait signaler une pathologie sévère ou une mesure erronée.
4	Très acide – Forte acidose, peut apparaître après un jeûne, une cétose avancée ou un régime hyperprotéiné.	Très acide – Inflammations buccales, stress intense, digestion fortement perturbée.
5	Acide – Fréquent le matin ou en cas de stress oxydatif, d'alimentation déséquilibrée ou d'excès de protéines animales.	Acide – Digestion insuffisante, flore buccale déséquilibrée, début d'acidose.
6	Modérément acide – Normale selon l'alimentation et le moment de la journée.	Légèrement acide – Courant après les repas ou chez les personnes stressées.
7	Neutre – Indique un bon équilibre acido-basique. Observé après une alimentation alcalinisante (végétale).	Neutre – Idéal pour une bonne santé buccale et digestive. Reflète une bonne régulation du terrain.
8	Alcalin – Peut signaler une infection urinaire (favorise les bactéries type Proteus), ou une diète très riche en légumes crus.	Alcalin – Parfois observé après rinçage ou brossage des dents, ou chez des personnes très alcalines.

Valeur pH

Urine – Signification possible

Salive –
Signification
possible

9 à 10

Très alcalin – Rare. Peut
indiquer une alcalose
métabolique, une
hyperventilation ou une
contamination urinaire.Très alcalin –
Peu fréquent,
souvent lié à
une erreur de
mesure ou à
une
stimulation
salivaire non
naturelle.

Caractéristiques techniques

Dimensions	5 m
Couleur	Blanc, Bleu
Stérile	Non sterile
Matière	Support papier cellulosique. Mélange de colorants indicateurs acido-basiques imprégnés. Boîtier plastique.
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Référence fabricant (MPN)	107238

Photos

Papier indicateur de pH urinaire et
salivaire avis 5 étoiles

Papier indicateur de pH longueur 5m

comment utiliser le Papier indicateur
de pH urinaire et salivaire