



DURACELL

[Fiche technique]

Pile Lithium CR123 Duracell pour défibrillateur AED Plus ZOLL

Réf. 970360 - 970361

PILE LITHIUM

Spécifiquement conçue pour le défibrillateur ZOLL AED PLUS

Capable de supporter 300 chocs ou 13h de fonctionnement

Longue durée de vie : jusqu'à 5 ans en veille

- Pile cr123 duracell spécifiquement conçue pour le [défibrillateur ZOLL AED PLUS](#) automatique et semi-automatique.
- Les piles cr123 assurent la durabilité et la fonctionnalité du défibrillateur.
- Pile Lithium cr123 pour AED Zoll capable de supporter 300 chocs ou 13h de fonctionnement.
- Pile défibrillateur 3V.
- Découvrez notre gamme complète de [batteries défibrillateur](#).
- Voici les équipements compatibles avec le défibrillateur AED PLUS ZOLL :
 - Les [électrodes défibrillateur adultes Stat Padz II](#)
 - Les [électrodes défibrillateur enfants Pedi Padz II](#)
 - Les [électrodes défibrillateur adulte CPRD](#)

Installation ou remplacement des piles lithium cr123

Pour assurer l'alimentation électrique du défibrillateur, utiliser 10 piles lithium CR123.

Ces piles cr123 doivent être utilisées avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.

De plus, vérifiez périodiquement pour vous assurer qu'elles ne sont pas périmées.

Installation des piles duracell cr123 :

1. Vérifier que l'appareil est hors tension.

Ouvrez le compartiment des piles en retirant le couvercle de celui-ci, situé à l'arrière de l'appareil.

Pour cela, insérer un petit outil (exemple : un tournevis plat) dans les deux fentes situées à l'arrière du défibrillateur pour appuyer sur les loquets,

puis introduire l'outil dans la rainure pour soulever le couvercle.

Installation des piles lithium cr123

2. Retirez la totalité des piles cr123 usagées et les jeter de façon appropriée.

Placez les piles neuves dans le compartiment des piles en prenant en compte du marquage des polarités et en vérifiant que toutes les piles sont

correctement en place et bien orientées.

Lorsque les 5–9 premières piles sont placées dans le compartiment, le DAE fait retentir le message "mettre les piles en place" pour vous

rappeler d'installer les piles restantes dans le compartiment des piles.

3. Après l'installation des piles lithium cr123 neuves, appuyer sur le bouton de réinitialisation des piles, situé à l'intérieur du compartiment des piles,

lorsque l'appareil le signale. Ce bouton permet de réinitialiser le témoin d'utilisation des piles pour qu'il indique une charge pleine.

PRECAUTION : ne placez pas de piles usagées dans le défibrillateur. Vous devez obligatoirement remplacer les 10 piles en même temps. Il ne faut pas remplacer les piles isolément. En effet, l'appareil ne fait pas la différence entre le remplacement total des piles ou partiel. L'utilisation des piles qui ne sont pas entièrement chargées est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de l'appareil au moment d'une réanimation.

Caractéristiques techniques

Couleur Cuir, Noir

Conforme 10g Non

Partie du corps

Références

- Réf. 970360** Pile lithium CR123 DURACELL - L'unité
- Réf. 970361** Pile Lithium CR123 DURACELL - Lot de 10

Photos



Pile Lithium CR123 Duracell



conditionnement Pile Duracell



Pile Lithium CR123 Duracell pour défibrillateur AED Plus ZOLL