

[Fiche technique]

Fausse plaie - Doigt sectionné

Réf. 333026

L'image représentée fait figurer le résultat final d'une fausse plaie. A combiner avec gamme de maquillage secourisme : pinceau, dissolvant, fard

- Maquillage blessure réaliste : fabriqué dans un matériau souple avec des bordures fines et transparentes permettant des formations particulièrement proche du réel.
- Maquillage SST et PSC1 facile à positionner (seulement 1 minute pour l'appliquer), pas de perte de temps à la préparation.
- Longue tenue : de 6 à 8 heures
- Résiste à l'eau
- Réutilisable
- Appliquer du maquillage sur la fausse plaie pour simuler une blessure réaliste pendant vos formations de secourisme.

fausse plaie



Etaler une
première couche
de protection latex

plaie artificielle




Utiliser un [fard](#)
[jaune](#) pour colorer
le doigt

fausse plaie secourisme




Coller le postiche de simulation de fausse plaie à l'aide de la [colle pour fausses plaies](#)

fausses plaies

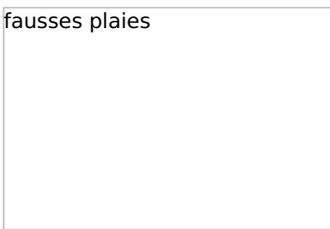


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Appliquer du fard bleu autour de la partie à couper. Ajouter du fard rouge.




Ajouter du [sang gélifié](#) à l'intérieur du cratère

fausses plaies secourisme

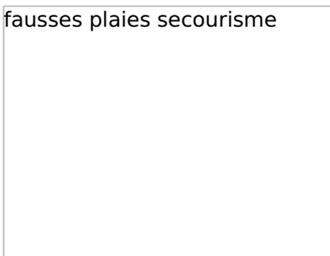

Ajouter du faux [sang artificiel](#) autour de la plaie artificielle et sur le doigt

maquillage fausse plaie

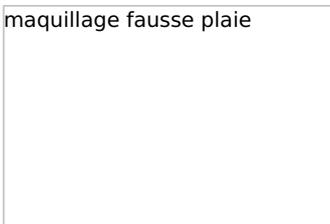

Résultat final

Informations complémentaires

Plaies réutilisables.

Voici le matériel dont vous aurez besoin pour rendre la plaie encore plus réaliste :

- Latex liquide (Ref.333304)
- Fard crème jaune - bleu - rouge (Ref.333300)
- Plasto nat (Ref.333306)
- Pinceau (Ref.333320)
- Faux sang gélifié (Ref.333301)
- Sang artificiel (Ref.333032)
- Dissolvant (Ref.333318)

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Utilisation	Réutilisable
Instructions d'utilisation	Réalisation du maquillage : Étape n°1 : Appliquer une fiche couche de latex sur la 2ème phalange du majeur Étape n°2 : Faire un cylindre de Plasto-Nat de la taille de la phalange Étape n°3 : Colorer le doigt avec du Fard jaune Étape n°4 : Appliquer sur la bordure de la partie à couper du Fard bleu puis superposer du Fard rouge. Positionner le cylindre de Plasto-Nat en continuité de la phalange Étape n°5 : Etirer le Plasto-Nat du centre vers l'extérieur Étape n°6 : Colorer l'intérieur du cratère avec le pinceau et du fard rouge sans colorer les lèvres du Plasto-Nat Étape n°7 : Remplir le cratère de sang gélifié et recouvrir les bords du Plasto-Nat
Accessoires et Consommables	Réf. 333300 - Fard crème pour maquillage de secourisme - Palette de 10 couleurs Réf. 333301 - Faux sang gélifié Maqpro Réf. 333304 - Latex liquide - Flacon de 60 ml Réf. 333306 - Plasto-Nat 35 ml Réf. 333316 - Plasto-Nat 200 ml Réf. 333318 - Dissolvant pour colles et latex - Flacon de 60 ml Réf. 333320 - Pinceau maquillage pro N°2 Réf. 333321 - Pinceau maquillage pro N°6 Réf. 333032 - Faux sang normal Maqpro 125 ml

Photos

