



[Fiche technique]

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen

Réf. 970900

AVIS



Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen

Dispositif à utiliser en cas de projection de corps étrangers dans les yeux.

Il présente un côté avec une pointe métallique aimantée : permet de retirer sans risque des échardes métalliques et des limailles de fer de l'oeil.

Et un côté avec une pointe métallique avec boucle en nylon : pour retirer des échardes non métalliques et des poussières.

Rangement pratique et hygiénique : les 2 embouts, qui s'emboitent dans le stylo oculaire, sont parfaitement protégés.

Découvrez notre gamme complète de [rinçage oculaire](#).

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensions | (Lxlxh) 12 x 1 x 1 cm |
| Couleur | Blanc |
| Stérile | Non stérile |
| Conforme 10g | Non |
| Matière | plastique rondelles en néoprène boucle en nylon |
| Unité de vente | A l'unité |
| Poids | 15 g |
| Garantie | 1 |
| Instructions d'utilisation | -Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde. -Effectuer l'extraction et rincer abondamment avec de l'eau. -Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante. -Eviter tout contact des rondelles en néoprène avec la solution désinfectante. |
| Classification | Dispositif medical de classe 1 |
| Partie du corps | |
| Code SH | 9018501000 |
| Référence fabricant (MPN) | 640 |
| Poids du produit | 0.02 |

Photos



Stylo oculaire réutilisable pour éliminer poussière et corps étranger
avis 4.8 étoiles



Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen



Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen globe de l'oeil



Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen globe de l'oeil