



[Fiche technique]

Thermomètre frontal bandelette - Boîte de 100

Réf. 970140

Thermomètre frontal bandelette - Boîte de 100

Thermomètre Frontal Bandelette – Boîte de 100

Thermomètres à cristaux liquides réutilisables, sûrs et rapides

Lecture facile en 15 secondes – Réutilisables et sans mercure

Optez pour une solution simple, hygiénique et économique pour la prise de température.

Ces thermomètres frontaux en bandelette utilisent une technologie à cristaux liquides qui affiche la température en seulement 15 secondes, avec une graduation de 0,5 °C pour une lecture fiable et rapide.

Mode d'emploi

1. Appliquer la bandelette sur le front, au-dessus des sourcils.
2. Maintenir en place pendant environ 15 secondes.
3. Lire la température directement sur la bandelette : la couleur indique la valeur mesurée.

Utilisations recommandées

Ces thermomètres bandelettes sont particulièrement adaptés pour :

- Les établissements scolaires et crèches
- Les entreprises pour un dépistage ponctuel
- Les professionnels de santé (infirmiers scolaires, médecins, secours)
- Les familles souhaitant un dispositif simple à utiliser

Comparatif des principaux types de thermomètre :

Type de thermomètre

Avantages

Inconvénients

Type de thermomètre

Frontal à cristaux liquides (bandelette)

Avantages

- Lecture rapide (15 sec) -
Réutilisable - Sans contact
prolongé - Non toxique, sans
mercure - Incassable et très
économique

Inconvénients

- Moins précis
qu'un
thermomètre
électronique -
Sensible à la
température
ambiante -
Lecture
subjective
possible

Auriculaire (infrarouge)

- Lecture très rapide (1 à 3 sec)
- Bonne précision si bien
positionné - Confortable

- Moins fiable
chez les très
jeunes enfants
- Doit être bien
inséré dans le
conduit auditif -
Coût plus élevé

Frontal infrarouge (sans contact)

- Lecture immédiate - Très
hygiénique - Facile à utiliser

- Précision
variable selon
la distance et
l'environnement
- Prix plus
élevé -
Fonctionne
avec piles ou
batterie

Électronique à embout rigide (oral, axillaire, rectal)

- Haute précision -
Technologie éprouvée -
Affichage numérique clair

- Temps de
lecture plus
long (30 à 60
sec) -
Nécessite un
contact direct -
Moins pratique
pour une
utilisation
rapide ou
collective

Caractéristiques techniques

Marque	Givedis
Couleur	Noir, Rouge
Conforme 10g	Non
Matière	Cristaux liquides
Unité de vente	Boîte de 100
Garantie	12
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9025190000
Référence fabricant (MPN)	25596
Étanche	Non
Poids du produit	0.1

Photos



thermometre frontal bandelette boite
de 100